

Empfehlung zur täglichen Lidrandpflege

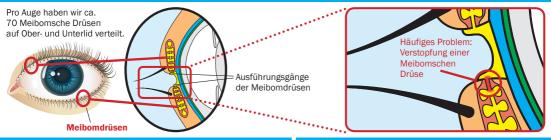

1. Liderwärmung



Kontaktlinsen vor der Lidrandpflege entfernen. Liderwärmung (ca. 45°C) für ca. 4 - 10 Minuten um das zähe und verdickte Sekret in den Meibomschen Drüsen zu verflüssigen. Verwenden Sie dazu z.B. eine Wärme Maske oder einen feuchtwarmen Waschlappen.

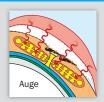

2. Lidmassage

eyepeace Lid-Massagehilfe






Streichen Sie mit einem Finger bei geschlossenem Auge mehrfach am

Oberlid von oben nach unten und am Unterlid von unten nach oben,

jeweils zum Lidspalt hin, vom äußeren zum inneren Lidwinkel.





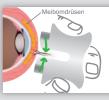

Evepeace auf das geschlossene Lid setzen und 5 - 10 x sanft zusammendrücken.


3. Lidreinigung



Lidreinigung zur Entfernung der gelösten Sekrete, Ablagerungen und Keime

Streichen Sie mit einem in Reinigungsflüssigkeit (idealerweise tensidfrei) getränkten Wattepad bei geschlossenem Auge am Oberlid sanft von oben nach unten, beim Unterlid von unten nach oben, jeweils zum Lidspalt hin und danach horizontal vom äußeren zum inneren Lidwinkel.



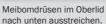



Meibomdrüsen im Unterlid nach oben ausstreichen.

Bei Massage und Reinigung immer in Richtung der Ausgänge der Meibomdrüsen ausstreichen.




PZN (DE): 0188073 | PZN (AT): 3754024 Medizinprodukt

> BlephaCura® Wärme Gel Maske PZN (DE): 9300028 | PZN (AT): 3870888 Blepha Cura



BlephaCura® The Eye Doctor® Augen-Wärme-Maske PZN (DE): 11852918 | PZN (AT): 4483900 Medizinprodukt



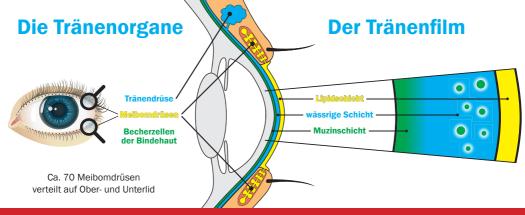

Zwei Formen des Trockenen Auges

"Wässriger" Mangel Hypovolämisches trockenes Auge



TEARS AGAIN® Augentropfen bei trockenen, gereizten oder brennenden Augen

- zur Befeuchtung der Augen
- ohne Konservierungsmittel
- ✓ mit hochwertiger Hyaluronsäure 1 mg/ml
- ✓ mit allen Kontaktlinsen verträglich


TEARS AGAIN® Augentropfen GEL:

- ✓ zur intensiven und nachhaltigen Befeuchtung
- ✓ mit hochwertiger Hyaluronsäure 3 mg/ml



TEARS AGAIN® Augentropfen 10ml PZN (DE): 09932225 PZN (AT): 4030297 Medizinprodukt TEARS AGAIN® Augentropfen GEL 10ml PZN (DE): 11034048 PZN (AT): 4307149 Medizinprodukt

"Lipid" Mangel Hyperevaporatives trockenes Auge

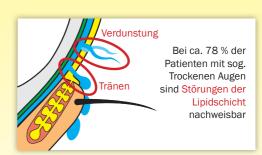

TEARS AGAIN® liposomales Augenspray bei brennenden und trockenen Augen

- ▼ Bequeme Anwendung: einfach auf das geschlossene Auge sprühen
- Langanhaltende Wirkung bis zu 4 Std.
- ✓ Verbessert die Tränenfilmstabilität
- ✓ Auch mit Kontaktlinsen und Make-up anwendbar

TEARS AGAIN® Augenspray Sensitive:

- ✓ mit Dexpanthenol bei empfindlicher Augenpartie
- √ ohne Konservierungsmittel



TEARS AGAIN® Augenspray 10 ml PZN (DE): 03043582 PZN (AT): 3726022 Medizinprodukt

TEARS AGAIN® Augenspray Sensitive 10 ml PZN (DE): 09727778 PZN (AT): 3996141 Medizinprodukt