

# AUDILYSE

PZN:10627214 / EAN:7640107850806

Hersteller:

Laboratoires DIEPHARMEX, Genf, Schweiz

**AUDILYSE** dient zur kurativen Behandlung. Es löst und weicht bereits geformte Ohrenschmalzpfropfen auf und reinigt den äusseren Gehörgang von einem Überschuss an Zerumen.

**AUDILYSE** kann zu Hause angewendet werden, um den Überschuss oder Zeruminalpfropfen rasch aufzulösen; 2 Sprühstösse 2 Mal täglich während 3-5 Tagen im äusseren Gehörgang anwenden.

Beim Arzt: Vor dem Entfernen eines Ohrenschmalzpfropfens erleichtert und verkürzt **AUDILYSE** diesen unangenehmen Eingriff; 4 Sprühstösse 15 Minuten vor der Behandlung in den äusseren Gehörgang geben.

**AUDILYSE** ist ein Medizinprodukt der Klasse1 gemäss der Europäischen Richtlinie 93/42/CE und trägt als Titel dieser Richtlinie die Kennzeichnung CE.

Inhaltsstoffe: **AUDILYSE** 20 ml

Diocetylatriumsulfosuccinat; Ethoxydiglycol, Phenoxyethanol+ Caprylyglykol, gereinigtes Wasser

Vorsichtsmassnahmen:

- Nicht länger als 5 Tage am Stück anwenden.
- Nicht ohne ärztlichen Rat anwenden im Falle einer Ohrenentzündung, Schmerzen oder sonstige Veränderungen am Ohr und im Gehörgang, bei Trommelfellperforationen und ganz allgemein bei allen Personen, die bereits ein Problem mit den Ohren haben oder hatten (Schwindel, medizinische oder chirurgische Vorgeschichte...).
- Nicht anwenden bei einer bekannten Allergie auf einen der Inhaltsstoffe.
- Vermeiden Sie den Kontakt des Produktes mit den Schleimhäuten, vor allem am Auge; im Falle eines Kontaktes sofort und reichlich mit Wasser spülen.
- Für Kinder unerreichbar aufbewahren

Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich vor der Anwendung an Ihren Arzt oder Apotheker.