

Boston® Advance Pflegesystem

Pflege für formstabile, sauerstoffdurchlässige Kontaktlinsen.

Handhabung & Hinweise für den Gebrauch:

ANWENDUNG: Lesen Sie dieses Informationsblatt sorgfältig, besonders die Warnhinweise, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Heben Sie es für zukünftiges Nachlesen auf.

Das Boston® Advance Pflegesystem enthält:

Das Boston® Advance Pflegesystem besteht aus Boston® Advance Linsenreiniger für die tägliche Reinigung Ihrer Kontaktlinsen und der Boston® Advance Aufbewahrungslösung zur Aufbewahrung, Desinfektion und Benetzung der Kontaktlinsen vor und während des Kontaktlinsentragens. Für die richtige Pflege Ihrer Kontaktlinsen ist es wichtig, beide Lösungen zu verwenden.

Boston® Advance Linsenreiniger

Der Boston® Advance Linsenreiniger ist geeignet zum Reinigen von Fluorsilikonacrylat und Silikonacrylat Kontaktlinsen vor der Aufbewahrung. Der Boston® Advance Linsenreiniger entfernt Tränenfilmlagerungen, hartnäckige Oberflächenablagerungen (inklusive Proteine und Lipide) und Rückstände von diesen Kontaktlinsen.

BESCHREIBUNG UND INHALTSSTOFFE: Der Boston® Advance Linsenreiniger ist eine weiß-gelbliche, sterile, wässrige Suspensionslösung, die oberflächenaktive Stoffe und ein mildes Schleimittel enthält. Aktiver Inhaltsstoff: Alkyläthesulfat (9,8%); weitere Bestandteile: Ethoxilierte Alkylphenole, Natriumchlorid, Siliciumdioxid-Suspension, Natriummonohydrogenphosphat und Phospholipid (modifiziertes Kokosfett).

Bei allergischen Reaktionen auf einen oder mehrere der aufgeführten Inhaltsstoffe diese Lösung nicht verwenden.

ANWENDUNG:

1. Vor der Handhabung der Kontaktlinsen waschen Sie bitte Ihre Hände.
2. Reiben Sie die Kontaktlinsen von beiden Seiten vorsichtig mit 6-8 Tropfen Boston® Advance Linsenreiniger in Ihrer Handfläche für 20 Sekunden.
3. **ENTFERNEN SIE DEN LINSENREINIGER GRÜNDLICH WIE VON IHREM KONTAKTLINSENESPEZIALISTEN EMPFOHLEN.**
4. Legen Sie die Kontaktlinsen in den Aufbewahrungsbehälter und bedecken Sie sie mit frischer Aufbewahrungslösung, indem Sie die nebenstehenden Anwendungshinweise für die Aufbewahrungslösung befolgen.
5. Nach jedem Gebrauch Flasche sorgfältig verschließen.

SICHERHEITSHINWEISE: Um eine gründliche Hygiene Ihrer Kontaktlinsen zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die Anwendungshinweise sorgfältig.

- **Benetzen oder lagern Sie Ihre Kontaktlinsen niemals mit Boston® Advance Linsenreiniger.**
- Spülen Sie Ihre Kontaktlinsen stets nach der Reinigung gründlich ab, wie von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlen.
- Verwenden Sie die Lösung niemals wiederholt.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollte die Tropferspitze nicht mit Gegenständen oder den Händen berührt werden.
- Reinigen Sie die Kammern Ihres Aufbewahrungsbehälters gründlich mit heißem Wasser und lassen Sie ihn dann an der Luft trocknen. **Entfernen Sie stets die restliche Aufbewahrungslösung aus dem Behälter, nachdem Sie die Kontaktlinsen entnommen haben.**
- Verbrauchen Sie die Lösung, bevor das Verfalldatum auf der Packung abgelaufen ist. Auch bei ungeöffneter Packung nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden. 90 Tage nach dem ersten Öffnen die Lösung nicht mehr verwenden. Beachten Sie stets die gründliche Hygiene und die Handhabungshinweise. Bei unsachgemäßer Handhabung der Kontaktlinsen und des Pflegemittels können Verunreinigungen und Augeninfektionen auftreten.

ACHTUNG:

- **DIESES PRODUKT IST NICHT ZUR DIREKTEN ANWENDUNG AM AUGE GEEIGNET.**
Sollte der Linsenreiniger ins Auge gelangen, entfernen Sie die Kontaktlinsen und spülen Sie Ihre Augen gründlich mit fließendem Wasser aus oder wie von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlen. Falls notwendig suchen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten auf.
- Dieses Produkt ist nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- **AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN.**

BEI UNVERTRÄGLICHKEIT WIE STARKEM TRÄNENFLUSS, SEHBEEINTRÄCHTIGUNG ODER RÖTUNG DER AUGEN ENTFERNEN SIE DIE KONTAKTLINSEN UMGEHEND UND SUCHEN SIE IHREN KONTAKTLINSENESPEZIALISTEN AUF.

Verkaufsgrößen:

Der Boston® Advance Linsenreiniger ist in einer sterilen 30ml Flasche erhältlich. Die Flasche ist mit einer Lotnummer und einem Verfalldatum versehen.

Bausch & Lomb Boston® Advance Comfort Formula Aufbewahrungslösung:

Bausch & Lomb Boston® Advance Comfort Formula Aufbewahrungslösung ist eine speziell formulierte Lösung zur Pflege formstabiler, gasdurchlässiger Kontaktlinsen. Sie enthält ein patentiertes Multi-Polymer-Komfortsystem, das sich an die Linsenoberfläche bindet und auf dieser einen schützenden Film bildet. Es umhüllt die Kontaktlinse mit einem Polster erleichtert so das Aufsetzen und sorgt für eine gleichbleibend hohe Benetzung über den ganzen Tag. Das patentierte Multi-Polymer-System der Bausch & Lomb Boston® Advance Comfort Formula Aufbewahrungslösung vermindert Reizungen sowohl auf dem Auge als auch am Augenlid und sorgt für den Abtransport von Fremdkörpern, die Trageprobleme verursachen könnten.

Die Inhaltsstoffe dieser Pflegelösung wurden auf den Stoffwechsel Ihrer Augen abgestimmt. Sie enthält daneben ein optimiertes Konservierungssystem, das Krankheitserreger auf der Oberfläche formstabiler, gasdurchlässiger Kontaktlinsen in wirksamer Weise unschädlich macht.

Bausch & Lomb Boston® Advance Comfort Formula Aufbewahrungslösung ist speziell für den Gebrauch mit Kontaktlinsen aus Fluorsiliconacrylat und Siliconacrylat sowie oberflächenbehandelten formstabilen, gasdurchlässigen Kontaktlinsen entwickelt, nachdem diese gereinigt worden sind. Die Lösung eignet sich auch zur Pflege von PMMA Kontaktlinsen.

INHALTSSTOFFE: Bausch & Lomb Boston® Advance Comfort Formula Aufbewahrungslösung ist eine sterile Pflegelösung. Sie enthält die folgenden Inhaltsstoffe: Desinfektionsmittel: Polyammoniumpropylbiguanid (0,0005 %), Chlorhexidinguconat (0,003 %), EDTA Dinatriumsalz (0,05 %). Sonstige: Salze und Pufferverbindungen, Polyquaternium 10, Verdickungsmittel auf Cellulosebasis, Polyvinylalkohol, derivatisiertes Polyethylenglycol.

ANWENDUNG:

1. Waschen Sie sich stets die Hände, bevor Sie die Kontaktlinsen anfassen.
2. Folgen Sie beim Reinigen der Kontaktlinsen der Anleitung auf Ihrem Kontaktlinsenreiniger.
3. Legen Sie die Kontaktlinsen in den Behälter zur Aufbewahrung und bedecken Sie beide Kontaktlinsen mit frischer Bausch & Lomb Boston® Advance Comfort Formula Aufbewahrungslösung.
4. Lassen Sie die Lösung für eine wirksame Desinfektion mindestens vier (4) Stunden lang einwirken, ehe Sie sie auf Ihre Augen setzen.
5. Nachdem Sie die Kontaktlinsen dem Behälter entnommen haben, geben Sie vor dem Aufsetzen noch einmal frische Lösung auf die Kontaktlinsen.
6. Den Aufbewahrungsbehälter täglich mit Boston® Advance Comfort Formula Aufbewahrungslösung sorgsam ausspülen und anschließend offen trocken lassen.

VORSICHTSMASSNAHMEN: Es ist von größter Wichtigkeit, dass Sie alle Anweisungen und Anleitungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten zum korrekten Gebrauch Ihrer Kontaktlinsen wie auch zum Gebrauch der diesbezüglichen Pflegeprodukte sorgsam befolgen.

- **Gebrauchte Lösungen niemals wiederverwenden.** Für eine wirksame Desinfektion die Lösung im Aufbewahrungsbehälter täglich vollständig erneuern.
- **Kontaktlinsen niemals in Reinigungslösung aufbewahren.**
- Lösung nach dem auf der Flasche angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Letzteres gilt auch für noch ungeöffnete Flaschen.
- Angebrochene Flasche nicht länger als neunzig (90) Tage verwenden.
- Stets sorgsam auf Hygiene und korrekte Handhabung achten. Andernfalls besteht die Gefahr einer Verunreinigung der Kontaktlinsen und der Pflegelösung mit Bakterien.
- Vermeiden Sie es, diese Lösung in Kontakt mit Kleidung oder Handtüchern zu bringen, da sie auf verschiedenen Stoffen Flecken verursachen kann.

WARNHINWEISE:

- Diese Lösung ist nicht für weiche Kontaktlinsen geeignet.
- **VON KINDERN FERNHALTEN**
- Bei offensichtlich verletztem oder gar fehlendem Siegel Lösung nicht verwenden.
- Lösung nicht verwenden, wenn Sie gegen irgendeinen Bestandteil des Produkts allergisch sind.
- **WENN SIE EINE REIZUNG ODER GAR SCHMERZEN IM AUGE VERSPÜREN, ÜBERMÄSSIGEN TRÄNENFLUSS, SEHBEEINTRÄCHTIGUNGEN ODER EINE RÖTUNG DES AUGES FESTSTELLEN, KONTAKTLINSEN SOFORT ABSETZEN UND UNVERZÜGLICH KONTAKT MIT IHREM KONTAKTLINSENSPEZIALISTEN AUFNEHMEN.**

Lieferform:

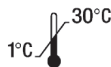
Bausch & Lomb Boston® Advance Comfort Formula Aufbewahrungslösung wird in sterilen Flaschen zu 120 ml angeboten. Die Flaschen tragen eine Lotnummer und ein Verfalldatum.

Die folgenden Hinweise gelten für beide Produkte.

 Bausch & Lomb Incorporated
Rochester NY 14609 USA

 0050

 Bausch & Lomb Incorporated
106 London Road, Kingston-upon-Thames KT2 6TN, UK

 30°C
1°C