

Clearblue[®] PLUS

mit **SICH FÄRBENDER TESTSPITZE**

- Clearblue[®] Plus ist ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode zu über 99 % zuverlässig.
- Clearblue[®] Plus kann bis zu 5 Tage vor der ausgebliebenen Periode angewendet werden.

Bitte lesen Sie diesen Beipackzettel aufmerksam durch, bevor Sie den Test durchführen.

Schwangerschaftstest

Bevor Sie beginnen

Es ist hilfreich, bei der Durchführung des Tests eine Uhr zur Hand zu haben.

1 DURCHFÜHREN DES TESTS

Wenn Sie diesen Schwangerschaftstest ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode verwenden, können Sie ihn jederzeit durchführen. Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag der Periode testen, verwenden Sie hierfür Morgenurin.

Wenn Sie für den Test bereit sind, nehmen Sie das Teststäbchen aus der Folienverpackung und ziehen Sie die Kappe ab. Testen Sie unmittelbar danach.

MIT IHREM URINSTRAHL TESTEN

Sie können die Testspitze direkt in Ihren Urinstrahl halten **oder** eine Urinprobe in einem sauberen und trockenen Behälter sammeln und die Testspitze hineintauchen.

- Halten Sie die sich färbende Testspitze nach unten gerichtet entweder in Ihren Urinstrahl **oder**, wie gezeigt, für volle **5 Sekunden** in die gesammelte Urinprobe.
- Die sich färbende Testspitze färbt sich rasch rosa, um zu zeigen, dass Sie Urin aufnimmt. **Sie müssen die sich färbende Testspitze für volle 5 Sekunden in den Urin halten.**

Schutzkappe

Sich färbende Testspitze



Sie müssen die sich färbende Testspitze für volle 5 Sekunden in den Urin halten.



Beginnen Sie mit der Zeitnahme, sobald Sie sehen, dass sich die Spitze rosa färbt.

Urinstrahl **ODER** Probe

- Halten Sie die sich färbende Testspitze weiterhin nach unten oder legen Sie das Teststäbchen flach hin, bis Sie das Ergebnis ablesen können und in dem Kontrollfenster eine blaue Linie erscheint.
- Sie können die Kappe wieder aufsetzen.

Unter Frage 7 finden Sie weitere Informationen, wenn sich die sich färbende Testspitze nicht vollständig rosa färben sollte.

2 **3 Minuten**

WARTEN Sie 3 MINUTEN. Während der Test arbeitet, erscheinen blaue Linien.

3 ABLESEN IHRES ERGEBNISSES

Sie können Ihr Ergebnis nun im Ergebnisfenster ablesen.

Lesen Sie das Ergebnis erst ab, wenn eine blaue Linie im Kontrollfenster erscheint. Diese Linie zeigt an, dass der Test korrekt durchgeführt wurde.

Das Ergebnis „Schwanger“ kann innerhalb 1 Minute angezeigt werden, wenn Sie ab dem Tag testen, ab dem Ihre Periode ausbleibt (d. h. der Tag nach dem Fälligkeitstag Ihrer Periode). Sie müssen mindestens 3 Minuten warten, bis sich das Ergebnis „Nicht Schwanger“ bestätigt bzw. wenn Sie vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen (siehe **Frage 11**).

Erscheint innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung des Tests keine blaue Linie im Kontrollfenster, dann ist der Test nicht korrekt abgelaufen (siehe **Frage 8**).



NICHT SCHWANGER

SCHWANGER



Wenn Ihr Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet, finden Sie *unter Frage 13* im Abschnitt Fragen & Antworten weitere Informationen.



Wenn Ihr Ergebnis „Schwanger“ lautet, finden Sie *unter Frage 14* im Abschnitt Fragen & Antworten weitere Informationen.



Wenn die Linien im Ergebnisfenster ein Pluszeichen (+) bilden, lautet das Ergebnis „Schwanger“, unabhängig davon, ob eine der Linien heller oder dunkler ist als die andere.



WICHTIG! Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von **10 Minuten** nach Durchführung des Tests ab. Ignorieren Sie Veränderungen Ihres Resultates nach dieser Zeit.

Wenn Sie sich immer noch unsicher sind, ob das Ergebnis korrekt ist, finden Sie *unter Frage 9* weitere Informationen.

Fragen und Antworten

- Wie zuverlässig ist Clearblue® PLUS?**
Labortests haben gezeigt, dass Clearblue® PLUS ab dem Fälligkeitstag Ihrer Periode zu über 99 % zuverlässig ist.
- Wie funktioniert Clearblue® PLUS?**
Wenn Sie schwanger sind, produziert Ihr Körper das Schwangerschaftshormon hCG (humanes Choriongonadotropin). Die hCG-Konzentration im Körper steigt in der Frühschwangerschaft stetig an. Clearblue® PLUS kann schon winzige Mengen dieses Hormons in Ihrem Urin nachweisen. (Die Empfindlichkeit dieses Tests liegt bei 25 mIU/ml).
- Wann kann ich den Test mit Clearblue® PLUS durchführen?**
Clearblue® Plus kann bis zu 5 Tage vor der ausbleibenden Periode angewendet werden (dies entspricht 4 Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode). Wenn Sie vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen und das Ergebnis „Nicht Schwanger“ angezeigt wird, kann es sein, dass Sie trotzdem schwanger sind. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebnisse einer klinischen Untersuchung zu Clearblue® Plus mit Proben aus der Frühschwangerschaft.

Frühes Testen

Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitstag der Periode	% der schwangeren Frauen, die das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

- Muss ich eine Morgenurinprobe verwenden?**
Wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen, empfehlen wir, Morgenurin zu verwenden. Sie können aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt testen. Nehmen Sie vor dem Test nicht übermäßig viel Flüssigkeit zu sich.
- Ich bin mir nicht sicher, wann der Fälligkeitstag meiner Periode ist. Woher weiß ich, dass ich den Test zum richtigen Zeitpunkt mache?**
Um den Fälligkeitstag Ihrer Periode zu ermitteln, berechnen Sie Ihre gewöhnliche Zykluslänge, indem Sie die Anzahl der Tage vom ersten Tag Ihrer Periode bis zum Tag vor Ihrer nächsten Periode zählen.
• Wenn Ihre Zyklen unregelmäßig sind, sollten Sie vom längsten Zyklus der letzten Monate ausgehen, bevor Sie testen.
• Wenn Sie nicht wissen, wann Ihre Periode fällt ist, empfehlen wir, den Test frühestens 19 Tage nach dem letzten ungeschützten Geschlechtsverkehr durchzuführen. Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet und Sie trotzdem eine Schwangerschaft vermuten, finden Sie unter **Frage 13** weitere Informationen.
- Können Medikamente oder Erkrankungen mein Ergebnis beeinflussen?**
• Lesen Sie vor der Durchführung eines Tests grundsätzlich die Anweisungen des Herstellers des Medikaments durch, das Sie gerade einnehmen...
• Fruchtbarkeitsfördernde Arzneimittel, die hCG enthalten, können das Ergebnis verfälschen. (Diese Fruchtbarkeitsfördernden Arzneimittel werden üblicherweise injiziert. Wenn Sie zu früh nach der Behandlung testen, ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.)
• Andere fruchtbarkeitsfördernde Mittel (z. B. Clomiphencitrat), Schmerzmittel und hormonelle Verhütungsmittel (z. B. Antibabypille) sollten keinen Einfluss auf das Ergebnis haben.
• Wenn Sie erst jetzt Kurzen keine hormonellen Verhütungsmittel mehr einnehmen oder wenn Sie fruchtbarkeitsfördernde Mittel wie Clomiphencitrat einnehmen, kann Ihr Zyklus unregelmäßig sein, sodass Sie möglicherweise zu früh testen.
• Wenn Sie bis vor Kurzem schwanger waren (auch wenn die Schwangerschaft nicht ausgetragen wurde), ist es möglich, dass das Ergebnis „Schwanger“ angezeigt wird, obwohl Sie nicht schwanger sind.
• Eileiterschwangerschaft, Zysten an den Eizstöcken, die Wechseljahre und einige sehr seltene Erkrankungen können das Testergebnis verfälschen.
• Wenn Sie das Ergebnis „Schwanger“ erhalten haben, kann sich evtl. später herausstellen, dass Sie nicht schwanger sind, da sich im Frühstadium ein natürlicher Abgang ereignen kann.
Wenn Sie unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie Ihren Arzt kontaktieren.

- Ich habe den Schwangerschaftstest verwendet, aber die sich färbende Testspitze hat sich nicht vollständig rosa gefärbt. Was soll ich jetzt machen?**
Wenn sich die sich färbende Testspitze nicht vollständig rosa gefärbt hat, haben Sie möglicherweise nicht genügend Urin verwendet. Sollte aber dennoch die blaue Linie im Kontrollfenster innerhalb von 10 Minuten nach Anwendung des Tests erscheinen, dann ist der Test korrekt abgelaufen. Wenn innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests keine blaue Linie im Kontrollfenster erscheint, dann finden Sie unter **Frage 8** weitere Informationen.
- Ich habe den Schwangerschaftstest durchgeführt, aber im Kontrollfenster ist keine blaue Linie erschienen. Was soll ich jetzt machen?**
Erscheint innerhalb von 10 Minuten nach der Anwendung des Tests keine blaue Linie im Kontrollfenster, dann ist der Test nicht korrekt abgelaufen. Gründe dafür könnten die folgenden sein:
• Die sich färbende Testspitze wurde nicht nach unten gehalten oder der Test nach der Durchführung nicht flach hingelegt.
• Möglicherweise haben Sie zu viel oder zu wenig Urin verwendet. **Halten Sie die Testspitze für genau 5 Sekunden in den Urin.**
Sie sollten den Test mit einem neuen Teststäbchen wiederholen und dabei die Anwendungshinweise genau einhalten. Sie können Ihren Urin auch in einem sauberen und trockenen Behälter sammeln und nur die sich färbende Testspitze für 5 Sekunden in die Urinprobe eintauchen.
- Was mache ich, wenn ich mir bei dem Ergebnis nicht sicher bin?**
• Für das Ergebnis „Schwanger“ müssen innerhalb von 10 Minuten nach Testdurchführung eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein Pluszeichen (+) im Ergebnisfenster erscheinen.
Das Erscheinungsbild des Pluszeichens (+) im Ergebnisfenster kann variieren. Allerdings sollten die beiden Linien des Pluszeichens und die Linie im Kontrollfenster etwa die gleiche Breite haben (siehe Abbildungen A-C).
Abbildung A
Diese Abbildung zeigt das Ergebnis „Schwanger“. Diese Art der Anzeige ist wahrheitsgezielt, wenn Sie den Test vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen und die hCG-Konzentration in Ihrem Urin möglicherweise relativ gering ist.
Abbildung B
So kann es aussehen, wenn Sie schwanger sind und am bzw. um den Fälligkeitstag Ihrer Periode testen, da der hCG-Spiegel noch relativ niedrig ist.
Abbildung C
So kann es aussehen, wenn Sie schwanger sind und mehrere Tage nach dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen, da der hCG-Spiegel dann höher ist.
• Wenn Sie sich immer noch nicht sicher sind, warten Sie mindestens 3 Tage, bevor Sie erneut testen und halten Sie sich genau an die Gebrauchsanweisung. Für das Ergebnis „Nicht Schwanger“ müssen innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests eine blaue Linie im Kontrollfenster und ein Minuszeichen (-) im Ergebnisfenster erscheinen. Wenn das Ergebnis „Nicht Schwanger“ lautet und Sie dennoch vermuten, schwanger zu sein, finden Sie unter **Frage 13** weitere Informationen.
- Was könnte die Zuverlässigkeit des Ergebnisses beeinflussen?**
Die Zuverlässigkeit von Clearblue® Plus ist geringer, wenn Sie den Test an den Tagen vor dem Fälligkeitstag der Periode durchführen. Wenn Sie das Teststäbchen nicht genau für die vorgegebene Zeit in den Urin halten, kann das Ergebnis unzuverlässig sein. Solange Sie innerhalb von 10 Minuten nach der Durchführung des Tests im Kontrollfenster eine blaue Linie sehen, können Sie sich auf das Ergebnis verlassen. Wenn Sie wiederholt unerwartete Ergebnisse erhalten, sollten Sie das Gespräch mit Ihrem Arzt suchen. Weitere Informationen finden Sie auch unter **Frage 6**.
- Wann kann ich das Ergebnis ablesen?**
Das Ergebnis „Schwanger“ wird möglicherweise innerhalb von 1 Minute angezeigt, wenn Sie ab dem Tag testen, ab dem Ihre Periode ausbleibt (d. h. der Tag nach dem Fälligkeitstag Ihrer Periode)... Warten Sie, bis eine blaue Linie im Kontrollfenster erscheint, bevor Sie Ihr Ergebnis ablesen. Sie **müssen 3 Minuten** warten, bis sich das Ergebnis „Nicht Schwanger“ bestätigt bzw. wenn Sie vor dem Fälligkeitstag Ihrer Periode testen, bis sich ein Ergebnis innerhalb von **1 Minute** im Kontrollfenster, dann ist der Test nicht korrekt abgelaufen (siehe **Frage 8**).
- Wie lange kann das Ergebnis abgelesen werden?**
Das Ergebnis kann jederzeit nach 3 und bis 10 Minuten abgelesen werden. Ignorieren Sie Veränderungen Ihres Resultates nach 10 Minuten.
- Mein Test hat ergeben, dass ich nicht schwanger bin. Was soll ich tun?**
Es kann sein, dass Sie nicht schwanger sind oder die Konzentration des Schwangerschaftshormons zu niedrig ist, um es nachweisen zu können, oder dass Sie den Fälligkeitstag der Periode falsch berechnet haben.
• Wenn Sie früher getestet haben, testen Sie erneut, wenn Ihre Periode fällt ist. Wenn Ihre Periode überfällig ist, führen Sie nach drei Tagen einen weiteren Test durch. Wenn das Ergebnis dieses Tests ebenfalls „Nicht Schwanger“ lautet und Ihre Periode immer noch nicht eingesetzt hat, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.
- Mein Test hat ergeben, dass ich schwanger bin. Was soll ich tun?**
Wenn der Test angezeigt, dass Sie schwanger sind, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen und mit ihm das weitere Vorgehen besprechen.

www.clearblue.com

Berater/innen sind Mo-Fr von 08:00 – 16:00 Uhr erreichbar, außer an Feiertagen.

DE 0800 589 4015 • AT 0800 070 359

Kostenlos aus dem Festnetz, bei Anrufen aus dem Mobilfunknetz können Kosten entstehen. Alle Anrufe werden aufgezeichnet und eventuell zur Qualitätskontrolle abgehört. Bitte halten Sie die Chargennummer **LOT** bereit.

IVD	Medizinisches Produkt für die In-vitro-Diagnostik	LOT	Batch-Code	Nicht wiederverwenden
Temperaturbegrenzung 2°C - 30°C		Verfallsdatum	Hersteller	

Hersteller: SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD), Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, Genf, Schweiz.
© 2015 SPD. Alle Rechte vorbehalten. Clearblue ist eine Marke von SPD.

Weitere Informationen und allgemeine Hinweise zum Thema Schwangerschaft finden Sie auf unserer Webseite:

www.clearblue.com

Dieser Test ist für die Verwendung zu Hause bestimmt.

Bei Raumtemperatur aufbewahren.

Bei Aufbewahrung im Kühlschrank vor der Verwendung mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur erwärmen lassen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Ausschließlich zur Verwendung in der In-Vitro-Diagnostik.

Entsorgung mit normalem Hausmüll.

Nicht verwenden, wenn die Folienverpackung beschädigt ist.

Teststäbchen nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.



0843