

# schülke -†



## esemfix®

Desinfizierender Schaumreiniger auf Basis von Alkoholen, Fruchtsäure und Tensiden.

### Unser Plus:

- desinfizierende Reinigung in einem Arbeitsgang
- mit besonders frischer Duftnote
- starke Reinigungsleistung
- gute Materialverträglichkeit
- streifenfrei nachwischbar
- gebrauchsfertig

### Anwendungsgebiete

Desinfizierende Reinigung von Medizinprodukten [C€ 0297] in allen Bereichen mit Anspruch auf hygienische Sauberkeit.

### Anwendungshinweise

esemfix® in der 1 l-Flasche mit aufschraubbarer, spezieller FOAM-Schaumsprühpumpe auf Flächen aufsprühen.

Ausbringung maximal 50 ml/m<sup>2</sup>.

Der Schaum ermöglicht ein Erkennen des Präparates auf behandelten Flächen. esemfix® einwirken lassen und anschließend Flächen mit sauberem Tuch nachwischen.

esemfix® ist gut materialverträglich – auch bei „Problemwerkstoffen“ wie Kunstleder, Möbelfurnier, Plexiglas usw.

Es hinterlässt keine Streifen oder sichtbaren Rückstände.

esemfix® hat sich auch zur desinfizierenden Reinigung von Speibecken in der zahnärztlichen Praxis bewährt. Das Speibecken vollflächig mit esemfix® einschäumen und das Präparat einwirken lassen. Verschmutzungen und Kalkrückstände lassen sich mit einem Einmaltuch leicht entfernen. Anschließend das Speibecken mit Wasser nachspülen. Die Funktionsfähigkeit der Absauganlage wird durch esemfix® nicht negativ beeinträchtigt.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

esemfix® verfügt über eine schnelle Wirkung gegenüber:

- Bakterien • Pilzen (C. albicans)

### Einwirkzeiten

Bakterien, Pilze (gemäß DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten): 2,5 Min.

### Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g enthalten: 12,6 g Ethanol (94 %ig), 17,4 g Isopropylalkohol, 0,13 g Äpfelsäure

Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004:

< 5 % anionische Tenside, Duftstoffe, Limonene

### Chemisch-physikalische Daten:

Aussehen:	klare bis leicht opale Flüssigkeit
Dichte (20 °C):	ca. 0,96 g/ml
Temperaturstabilität:	-5 °C bis +40 °C
pH-Wert:	ca. 3,2
Flammpunkt:	27 °C (DIN 51 755/1)

## Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

- R10:** Entzündlich.  
**R67:** Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.  
**S23:** Aerosol nicht einatmen.  
**S51:** Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

## Besondere Hinweise

Besonders alkoholempfindliche Materialien sollten nicht mit esemfix® besprüht werden.

Bitte beachten Sie den Brand- und Explosionsschutz beim Einsatz von alkoholischen Desinfektionsmitteln in der TRBA 250 "biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen".

## Lieferformen / Verpackungseinheiten

Gebindegrößen	Verpackungseinheiten	Art. Nr.
1 l-Flasche	10 x 1 l	183 110
5 l-Kanister	1 x 5 l	183 104

## Zubehör / Dosierhilfen

	Art. Nr.
FOAM-Schaumspühpumpe für die 1 l-Flasche	180 123
5 l-Kanisterhahn	135 501
5 l-Kanisterschlüssel	135 810
Umfülltrichter	117 901

Für ausführliche Informationen zu unseren Dosiergeräten fordern Sie bitte die Gesamtübersicht Hygiene-Technik an.

## Umweltinformationen

Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat esemfix® vorliegenden Gutachten/Literatur finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Für Ihre individuellen Fragen:  
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

**Schülke & Mayr GmbH**  
 22840 Norderstedt, Germany  
 Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
 Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

**Schülke & Mayr AG**  
 Sihlfeldstrasse 58  
 8003 Zürich, Schweiz  
 Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44  
 Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**Schülke & Mayr Ges.m.b.H**  
 Seidengasse 9  
 1070 Wien, Österreich  
 Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01-0  
 Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01-60  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)