



FROMMS-Condoms mit dem dlf-Qualitätssiegel der »Deutsche Latex Forschungsgemeinschaft Kondome e.V.« werden regelmäßig von der Staatlichen Materialprüfungsanstalt Darmstadt geprüft. Achten Sie auf dieses Zeichen beim Condomkauf.



MAPA GmbH  
Industriestraße 21–25  
27404 Zeven  
www.fromms.com

CE 0197

Art.-Nr. 11.520.089  
Rev. 12

# Fromms

— Qualität seit 1919 —

## GEBRAUCHSHINWEISE

### WICHTIGE HINWEISE

Beachten Sie bitte das auf der Verpackung und den Siegelbriefchen angegebene Haltbarkeitsdatum – nach Ablauf sollte das Condom nicht mehr verwendet werden! Condoms kühl, trocken und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Condoms greifen nicht in den Organismus ein und erzeugen keine Nebenwirkungen. Sollten dennoch Unverträglichkeiten (z. B. Latex-Allergie) auftreten, fragen Sie bitte Ihren Arzt um Rat.


### DAS FROMMS-SORTIMENT

- Die 10er- und 21er-Vorratspackungen mit transparenten, gefühlsechten Condomen
- Die handliche 4er-Packung mit transparenten, gefühlsechten Condomen



Jedes Condom wird einzeln elektronisch vorgeprüft. Fromms-Condoms sind ausschließlich für den vaginalen Geschlechtsverkehr bestimmt. Bei richtiger Anwendung schützen Fromms-Condoms auf natürliche Weise vor Befruchtung und Übertragung von Krankheitserregern. Kein Verhütungsmittel kann allerdings zu 100 % den Schutz vor Schwangerschaft oder Infektionskrankheiten garantieren.

## 1. AUFREISSEN

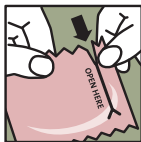

Die Siegelverpackung vorsichtig an der gekennzeichneten Stelle (»open here«) öffnen. Die Siegelverpackung kann so sauber aufgerissen werden, ohne das Kondom zu beschädigen.

**Vorsicht:** Mit scharfkantigen Gegenständen, Schmuck oder spitzen Fingernägeln könnten Sie das Kondom beschädigen. Kondome sind nur dann frisch und somit lange haltbar, wenn das Siegelbriefchen nicht geöffnet oder beschädigt ist.

## 2. VORSPIEL



Halten Sie das Reservoir so mit Daumen und Zeigefinger fest, dass dort kein Luftpolster entsteht. Ziehen Sie die Vorhaut zurück und rollen Sie das Kondom vom Reservoir her vollständig über den steifen Penis, **bevor** es zur ersten Berührung zwischen Penis und Vagina kommt. Lässt sich das Kondom →

## VORSICHT!

Wir raten grundsätzlich von der Verwendung zusätzlicher Gleitmittel auf Basis organischer fett- und/oder ölhaltiger Produkte (z. B. Vaseline, Babyöle, Körperlotion, Massageöle, Speisefette) ab. Diese greifen das Kondom an und lassen es schnell zerreißen. Falls Sie Gleitmittel verwenden, müssen diese vom jeweiligen Hersteller für den Gebrauch mit Kondomen zugelassen sein.

Bei Verwendung von Scheidenzäpfchen bitte die jeweilige Gebrauchsanweisung beachten. Werden im Bereich von Penis oder Vagina rezeptpflichtige oder rezeptfreie Medikamente (Salben, Gels) angewendet, fragen Sie Ihren Arzt oder →

nicht leicht abrollen, ist die Abrollrichtung falsch. Kondom **nicht** umdrehen – Gefahr des vorzeitigen Spermakontakts! Neues Kondom verwenden. Abrollrichtung beachten – Reservoir nach oben!

## 3. NACHSPIEL



Vor Erschlaffung des Glied aus der Vagina ziehen! Halten Sie dafür das Kondom am Penisansatz fest, während Sie den Penis behutsam aus der Scheide ziehen. So verhindern Sie ein Abrutschen des Kondoms.


## 4. ENTSORGUNG

Gebrauchte Kondome gehören in den Abfalleimer, nicht in die Toilette. Waschen Sie Penis und Hände, bevor Sie mit dem Liebespiel fortfahren. Kondome sind ausschließlich für den Einmalgebrauch bestimmt!

Apotheker nach der Verträglichkeit des Medikaments mit Kondomen. Tragen Sie während des Verkehrs Intimschmuck, besteht eine erhöhte Gefahr der Beschädigung des Kondoms.

## Persönliche und anonyme Telefonberatung zum Thema Safer Sex und Verhütung etc.:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)  
täglich ab 10.00 Uhr unter 01805/555 444 (0,12 €/min aus dt. Festnetz)  
telefonberatung@bzga.de oder [www.aidsberatung.de](http://www.aidsberatung.de)

	
erstellt am: <b>30.04.2009</b>	
Präparat: <b>Fromms</b>	
Land: <b>Deutschland</b>	Mat-Nr.: <b>11520089</b>
Format: <b>131 x 132 mm</b>	Schriftgröße:
Farben: <b>CMYK</b>	
Kunde: <b>Active International</b>	Auftr.-Nr.: <b>454894</b>
1. Korr. am 30.04.09 <input type="checkbox"/> druckreif <input type="checkbox"/> neuer Abzug	