

# GenuTrain®

Aktivbandage zur Entlastung und Stabilisierung des Kniegelenks.

Hilfsmittelnummer:  
05.04.01.0006



## Indikationen

- Reizzustände (Tendomyopathie, Ansatzligamentose, Meniskopathie, Arthrose, Arthritis, posttraumatisch und postoperativ)
- Instabilitätsgefühl

## Merkmale

- Neue Omega-Pelotte: Integrierte viscoelastische, die Patella ringförmig umschließende Pelotte mit zwei Druckpunkten auf dem distalen Pelottenabschnitt und mit zwei seitlichen Flügeln in Höhe der Menisken.
- Neues Gestrickkonzept: hochelastisch, atmungsaktiv und feuchtigkeitsabführend für exzellenten Tragekomfort.
- Neuer, besonders weicher und feiner Gestrickbereich in der Kniekehle.
- Anatomisches Formgestrick für optimale Passform und sicheren Sitz.
- Kompressionsverminderte Randzonen zur Druckausleitung an den Bandagenabschlüssen.
- Neue, integrierte Anziehhilfe erleichtert das Anlegen der Bandage.

## Wirkweise

- Die Omega-Pelotte bewirkt eine Umverteilung der Bandagenkompression von der Patella auf das umgebende Weichteilgewebe.
- Bewegungen des Kniegelenks bewirken eine Massage der parapatellaren Weichteilstrukturen durch den sich verformenden Pelottenring.
- Kompressions- und Massageeffekte beschleunigen die Resorption von Ödemen und Ergüssen und tragen zur Schmerzlinderung bei.
- Die Druckpunkte der Omega-Pelotte üben einen Druck auf den Hoffa'schen Fettkörper aus. Sie wirken druckentlastend und schmerzreduzierend auf den retropatellaren Bereich.
- Die seitlichen Flügel der Omega-Pelotte erreichen vordere Anteile der Meniskenlager und tragen über eine Wechselkompression zur Schmerzlinderung bei.
- Die komplexe Stimulation von Propriozeptoren durch die Bandage wirkt positiv auf die Sensomotorik und somit auf die belastungssichere Steuerung der Muskulatur.



Omega-Pelotte

## Farben

