

Blutzucker goldrichtig messen

Teststreifen Glucomen® LX Sensor

- Nur für das Blutzuckermessgerät GlucoMen® LX geeignet.
- Jeden Teststreifen nur einmal verwenden.

Diese Seite in das GlucoMen® LX-Messgerät einführen.




Blut an der Vorderkante auftragen.

Schnelle und sichere Messung




- Teststreifen GlucoMen® LX Sensor einführen.
- Nach 3 Sekunden erscheint ein blinkender Blutstropfen – das Gerät ist bereit.

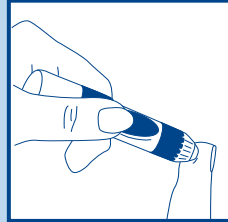

- Gewinnung eines Blutstropfens mit Glucoject® Dual.



- Blut auf den Teststreifen GlucoMen® LX Sensor auftragen.
- Das Blutstropfensymbol blinkt so lange, bis ausreichend Blut aufgetragen wurde.

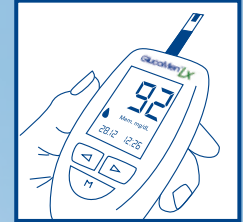


- Nach 4 Sekunden erscheint das Messergebnis.


Gespeicherte Messwerte abrufen




- Drücken Sie die Modustaste  des ausgeschalteten Messgeräts GlucoMen® LX, um es einzuschalten.



- Es erscheint der zuletzt gemessene Wert.
- Drücken Sie zum Einsehen der Mittelwerte für 1, 7, 14 und 30 Tage wiederholt die Modustaste .

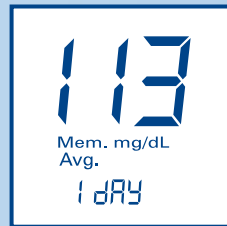


- Es erscheint der Mittelwert des vergangenen Tages.

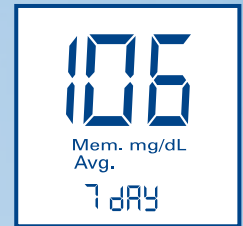

- Es erscheint der Mittelwert der letzten 7 Tage.



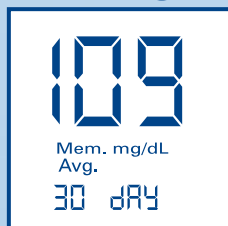

- Es erscheint der Mittelwert der letzten 14 Tage.




- Es erscheint der Mittelwert der letzten 30 Tage.



- Um alle gespeicherten Daten einzusehen, drücken Sie die Links-Rechts-Pfeiltasten  .
- Die linke Pfeiltaste führt zeitlich zurück.
- Die rechte Pfeiltaste führt zeitlich nach vorne.



- Zum Ausschalten des Messgeräts halten Sie die Modustaste  so lange gedrückt, bis auf dem Display keine Anzeige mehr zu sehen ist.
- Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet sich das Messgerät nach einer Minute automatisch aus.

Kunden-Service Diabetes
TELEFON (kostenlos)
0800 - 45 82 66 36 bzw.
0800 - GLUCOMEN

Wir sind gern für Sie da!

GlucoMen[®] LX
Goldrichtig messen

Blutzucker goldrichtig messen

Einstellen von Uhrzeit, Datum und akustischem Signal



- Halten Sie die Modustaste des ausgeschalteten Messgeräts länger als 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich an, zeigt 3 Sekunden lang alle Symbole an und schaltet sich dann in den SETUP-Modus (Einstellungen).
- Es können nacheinander eingestellt werden: Uhrzeit, Datum, akustisches Signal und Probenmarkierung. Die jeweils veränderbare Einstellung ist durch Blinken zu erkennen.
- Drücken Sie die Links-Rechts-Pfeiltasten , um die jeweilige Einstellung zu verändern.
- Drücken Sie die Modustaste , um die neue Einstellung zu bestätigen oder zur nächsten Einstellung überzugehen.
- Wenn Sie nur eine bestimmte Einstellung ändern wollen, drücken Sie wiederholt die Modustaste , bis Sie die Einstellung gefunden haben, die Sie ändern möchten.
- Den Einstellungsmodus verlassen Sie, indem Sie die Modustaste mindestens 3 Sekunden lang gedrückt halten.




Einstellung	Anzeige
Stunde (blinkend)	„14“:00
Minuten (blinkend)	14:„00“



Einstellung	Anzeige
Jahr (blinkend)	01-10-„2008“
Monat (blinkend)	01-„10“-2008
Tag (blinkend)	„01“-10-2008



Einstellung	Anzeige
Akustisches Signal (ON oder OFF)	„ON“

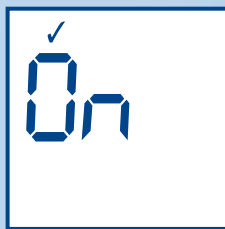

Einstellung	Anzeige
Probenmarkierung ✓ (ON oder OFF)	„ON“



Einstellung	Anzeige
END (Ende des Einstellungsmodus)	„End“