

Gebrauchsinformation

Beruhigt und lindert gereizte Augen.

Zur besseren Befeuchtung der Augen, insbesondere beim Tragen von harten und weichen Kontaktlinsen.

Herba-Vision® Augentrost sine (Euphrasia)

mit Hyaluronat

5 x 0,4 ml Augentropfen
20 x 0,4 ml Augentropfen

Konservierungsmittelfreie Lösung zum Befeuchten und Benetzen der Augen mit 0,05 % Augentrostinktur, hergestellt gemäß HAB 2000, und mit der körpereigenen benetzenden Substanz Natrium-Hyaluronat.

Herba-Vision® Augentrost sine Augentropfen bringen Linderung und beruhigen bei gereizten oder trockenen Augen, verursacht durch das Tragen von Kontaktlinsen, Müdigkeit, den Aufenthalt in verrauchten Räumen, langandauernde Computerarbeit oder Belastung durch allgemeine Umwelteinflüsse, wie Staubpartikel, Pollen usw.

Herba-Vision® Augentrost sine kann auch während des Tragens von Kontaktlinsen angewendet werden.

Nicht geeignet zum Aufbewahren von Kontaktlinsen!

Zusammensetzung:

1 ml isotonische Pufferlösung enthält
0,5 mg Natrium-Hyaluronat
0,5 mg Augentrostinktur (HAB 2000)
2,5 mg HPMC (Methocel®)

Anwendung:

Hände vor Gebrauch waschen und trocknen. Prüfen Sie vor dem ersten Öffnen, ob die Ampulle unversehrt ist, um Sterilität des Inhalts zu gewährleisten. Zum Öffnen das obere Ende der Ampulle abdrehen und Inhalt sofort verwenden. Bei Bedarf 2 Tropfen in den Bindehautsack eines jeden Auges einträufeln und durch Blinzeln verteilen. Achten Sie darauf, das Auge nicht mit der Ampulle zu berühren.

Bitte diese Gebrauchsinformation beachten.

Hinweise:

Bei Raumtemperatur lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht nach Überschreiten des Verfalldatums anwenden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Lösung nicht einnehmen. Im Falle einer Beschädigung die Ampulle nicht verwenden. Ampulle nach Gebrauch sofort vernichten. Um Augeninfektionen zu vermeiden, eine bereits geöffnete Ampulle nicht wiederverwenden. Um Kontamination zu vermeiden, die Tropferspitze nicht berühren. Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt. Nicht verwenden, wenn eine Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe besteht. Bei anhaltenden oder sich verschlechternden Beschwerden einen Facharzt/Spezialisten aufsuchen.

Stand der Information:

April 2013

Medizinprodukt

CE 0344



Hersteller:
OmniVision GmbH

Lindberghstraße 7
82178 Puchheim
Deutschland
Telefon +49 (0)89-84 07 92-30
Telefax +49 (0)89-84 07 92-40
www.omnivision.de
info@omnivision.de

Vertrieb Österreich:
OmniVision Ges.m.b.H.

Eichenstraße 32
1120 Wien
Österreich
Telefon +43 (0)1 81358-62
Telefax +43 (0)1 81358-63
www.omnivision.at
info@omnivision.at