Hydrosorb®

Der transparente, hydrozelluläre Gel-Verband für die feuchte Wundbehandlung

Charakteristik

Saugfähiger, hydrozellulärer Gel-Verband mit semipermeabler, keimdichter Deckschicht; transparent; sorgt durch hohen Wasseranteil von ca. 60 % sofort für ein ausgewogen feuchtes Wundmilieu; fördert Granulation und Epithelisierung; hervorragende Biokompatibilität; gute Polsterwirkung; ohne Wundirritation zu entfernen; auch mit Fixierfolie erhältlich.

Anwendung

Zur feuchten Wundbehandlung, insbesondere zur Versorgung klinisch nicht infizierter Wunden in der Granulations- und Epithelisierungsphase, bei Ulcus cruris oder Dekubitus; zur Versorgung von Verbrennungen bis

Grad 2a sowie zur Förderung der Reepithelisierung von Spalthautentnahmestellen nach vorausgegangener adäquater Blutstillung; durch die beschreibbare Abziehfolie lässt sich hervorragend die Wundgröße dokumentieren.

Hvdrosorb®

Der Gel-Verband verfügt über einen gewissen Selbsthafteffekt, für eine dauerhafte Fixierung empfiehlt sich jedoch zusätzlich eine Befestigung mit hypoallergenen Fixierpflastern oder Fixierbinden.

Hydrosorb® comfort

Zur sicheren, keimdichten Fixierung ist Hydrosorb comfort mit einer umlaufenden, hypoallergenen Klebefolie ausgestattet. IM = Innenmaß



Hydrosorb comfort ist transparent und bleibt es auch während des Gebrauchs. Der Wundzustand lässt sich iederzeit sicher beurteilen.

PZN

Artikel-

Vers.-Einh.



		inhalt	Nummer		Packungen
Hydrosorb® steril, einzeln eing	esiegelt				
5x7,5 cm		5 Stück	900 853	4426629	6
10x10 cm		5 Stück	900 854	4426635	6
20x20 cm		3 Stück	900 855	4426641	5
Hydrosorb® comfort steril, ei	nzeln eingesiegelt				
4,5x6,5 cm (IN	1 2,5x3,8 cm)	5 Stück	900 702	0256509	12
7,5x10 cm (IM	4x6,8 cm)	5 Stück	900 706	7721197	6
12,5x12,5 cm	(IM 8x8 cm)	5 Stück	900 723	7721205	6
21,5x24 cm (II	M 16x18,5 cm)	3 Stück	900 729	0256515	5

Packungs-