



Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

bitte lesen Sie diese Information sorgfältig, weil sie Ihnen helfen wird, hysan® Pflegespray richtig anzuwenden.

## **hysan® Pflegespray** Natriumhyaluronat und Dexpanthenol

Zur verbesserten Befeuchtung, Erfrischung und Pflege der Nasenschleimhaut.

Sterile Lösung ohne Konservierungsmittel

### **Was ist hysan® Pflegespray?**

hysan® Pflegespray ist eine sterile, konservierungsmittelfreie Lösung mit 0,25 mg/ml Natriumhyaluronat, Dexpanthenol sowie Natriumdihydrogenphosphat x 2 H<sub>2</sub>O, Natriummonohydrogenphosphat x 2 H<sub>2</sub>O, isotonisierenden Zusätzen und Wasser.

Eine Flasche enthält 10 ml Lösung; dies entspricht ca. 70 Sprühstößen.

### **Wozu dient hysan® Pflegespray?**

Dieses Nasenspray dient einer verbesserten Befeuchtung, Erfrischung und Pflege der Nasenschleimhaut. Auch bei Schnupfen empfiehlt sich die Anwendung als unterstützende Maßnahme.

### **Wann sollte man hysan® Pflegespray anwenden?**

Bei Aufenthalt in trockener, klimatisierter Umgebung, nach Einfluss von Wind und Sonne kann sich die Nasenschleimhaut trocken anfühlen. Dann ist es sinnvoll, durch Anwendung von hysan® Pflegespray der Nase intensive Feuchtigkeit zuzuführen und damit die natürliche Feuchtigkeitsbalance wieder herzustellen.

hysan® Pflegespray enthält das Natriumsalz der Hyaluronsäure, eine natürliche Substanz, die auch im Körper zu finden ist. Sie hat die besondere physikalische Eigenschaft, einen gleichmäßigen, stabilen und besonders lang haftenden Feuchtigkeitsfilm zu bilden. Dadurch hält der feuchtigkeitsspendende Effekt besonders lange an.

Darüber hinaus enthält hysan® Pflegespray Dexpanthenol, das zu der großen Stoffklasse der B-Vitamine gehört. Durch diesen Bestandteil wird das Bedürfnis der Nasenschleimhaut nach intensiver Regeneration gedeckt und die befeuchtende Eigenschaft von Natriumhyaluronat sinnvoll unterstützt.

hysan® Pflegespray eignet sich aufgrund dieser speziellen Eigenschaften insbesondere auch als sinnvolle Ergänzung einer Therapie mit schleimhautabschwellenden Nasensprays (bzw. -tropfen) bei Schnupfen. Hierbei sollte hysan® Pflegespray über die Anwendungsdauer des abschwellenden Arzneimittels hinaus angewendet werden, um eine optimale Regeneration der Nasenschleimhaut zu unterstützen.

### **Wie wendet man hysan® Pflegespray an?**



Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen.

Pumpe bis zum Austritt der Lösung betätigen (in der Regel 1–2 mal). Danach ist das System für jede weitere Anwendung gebrauchsfertig.

Die Sprühöffnung in das Nasenloch einführen und einmal pumpen, dabei leicht einatmen. Je nach Bedarf mehrmals täglich 1–2 Sprühstöße in jedes Nasenloch einsprühen. Aus hygienischen Gründen bitte den Nasenadapter nach jeder Anwendung abwischen und mit der Schutzkappe verschließen.

### **Welche weiteren Hinweise zur Anwendung sind zu beachten?**

Für den Fall einer zusätzlichen anderen medikamentösen Behandlung mit Nasenspray oder Nasentropfen sollte ein zeitlicher Abstand von mindestens 30 Minuten eingehalten werden. hysan® Pflegespray sollte dann immer zuletzt verabreicht werden.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie unsicher sind, ob und wie Sie mehrere Präparate zur Anwendung in der Nase kombinieren können.

Aufgrund seiner Konservierungsmittelfreiheit ist hysan® Pflegespray auch bei lang dauernder Anwendung besonders gut verträglich. Sie können es deshalb bedenkenlos auch über einen längeren Zeitraum benutzen.

### **Wie oft und wie lange sollte man hysan® Pflegespray anwenden?**

hysan® Pflegespray sollte individuell nach Ihrer Befindlichkeit und der Empfehlung Ihres Arztes oder Apothekers dosiert werden.

Üblicherweise werden von hysan® Pflegespray dreimal täglich je 1 bis 2 Sprühstöße in jedes Nasenloch verabreicht, es kann aber auch öfters angewandt werden. Es bestehen keine Beschränkungen in der Anwendungsdauer.





hysan® Pflegespray ist für eine Daueranwendung geeignet, allerdings sollten Sie – wie bei allen Erkrankungen – bei länger anhaltenden Beschwerden einen Arzt um Rat fragen.

### Wann sollte man hysan® Pflegespray nicht anwenden?

hysan® Pflegespray sollte nicht bei einer Überempfindlichkeit gegenüber einem der Bestandteile angewendet werden.

### Welche Hinweise zur Aufbewahrung von hysan® Pflegespray sind zu beachten?

Bei Raumtemperatur lagern.

Nach Anbruch der Flasche ist hysan® Pflegespray 6 Monate verwendbar.

Notieren Sie das Datum des Anbruchs auf der Verpackung und bewahren Sie diese auf.

Nach Ablauf des Verfalldatums (🕒) nicht mehr anwenden.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### Stand der Information:

März 2011

### Hersteller (🏭):

**URSAPHARM**

Industriestraße  
66129 Saarbrücken

Tel.: 06805/92 92-0

Fax: 06805/9292-88

E-Mail: [info@ursapharm.de](mailto:info@ursapharm.de)

[www.ursapharm.de](http://www.ursapharm.de)



### Wir wünschen Ihnen gute Besserung!

Ihre Meinung zu unserem Produkt ist uns wichtig!  
Wir freuen uns, per Post, Fax (Nr. 06805/92 92 222)  
oder via [www.ursapharm.info/hysan\\_pfllegespray](http://www.ursapharm.info/hysan_pfllegespray)  
von Ihnen zu hören.

