

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**Imidin® sanft Nasen-Pflegespray**

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

1 Zusammensetzung**Was ist in Imidin® sanft Nasen-Pflegespray enthalten?**

Isotonische Meersalzlösung mit Dexpanthenol sowie Kaliumdihydrogenphosphat, Kaliummonohydrogenphosphat und hochgereinigtes Wasser, ohne Konservierungsmittel.

1 Sprühstoß entspricht ca. 0,14 ml Lösung.

Hinweis:

Ohne Konservierungsstoffe, ohne Treibgas.

2 Darreichungsform und Inhalt

Lösung zum Einsprühen in die Nase.

Flasche mit 20 ml Lösung

3 Zweckbestimmung**Wann wird Imidin® sanft Nasen-Pflegespray angewandt?**

Der feine Sprühnebel ist eine sanfte Hilfe für die Nasenhöhlen, Nasennebenhöhlen und für die empfindliche Nasenschleimhaut, die für die Gesunderhaltung des Atemsystems sehr wichtig ist.

Imidin® sanft Nasen-Pflegespray wird angewandt:

1. Zur Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut z.B. bei trockener Luft in geheizten oder klimatisierten Räumen.
2. Zur Reinigung und sanften Spülung der Nasenhöhlen bei vermehrter Belastung mit Krusten, Hausstaub, Pollen und Keimen.
3. Zur Pflege der Nasenschleimhaut wie z.B. als begleitende Maßnahme bei Schnupfen und verstopfter Nase.

Imidin® sanft Nasen-Pflegespray ist auch für Säuglinge und Kleinkinder geeignet.

4 Gegenanzeigen

Bitte wenden Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray bei einer bekannten Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht an.

Bei verletzter Nase oder nach Operationen im Nasenbereich ist Imidin® sanft Nasen-Pflegespray nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt anzuwenden.

5 Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung von Imidin® sanft Nasen-Pflegespray gibt es keine Hinweise auf ein besonderes Risiko während der Schwangerschaft und Stillzeit.

6 Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Keine bekannt. Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem anderen Nasenspray sollten Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray vorher anwenden.

7 Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung**Wie oft und in welcher Menge sollten Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray anwenden?**

Fortsetzung auf der Rückseite >>

Kinder ab 2 Jahre und Erwachsene

Je nach Bedarf sprühen Kinder (ab 2 Jahre) und Erwachsene mehrmals täglich 1-2 Sprühstöße Imidin® sanft Nasen-Pflegespray in jedes Nasenloch.

Kleinkinder und Säuglinge

Je nach Bedarf erhalten Kleinkinder (unter 2 Jahre) und Säuglinge mehrmals täglich einen Sprühstoß Imidin® sanft Nasen-Pflegespray in jedes Nasenloch.

Wie sollten Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray anwenden?

Entfernen Sie zunächst die Schutzkappe und nehmen Sie dann die Sprühflasche in eine Hand (Abb. 1). Drücken Sie den Aufsatz so oft herunter, bis der erste Sprühstoß erfolgt (Abb. 2). Diesen Vorgang brauchen Sie bei Erwachsenen und Kindern ab 2 Jahren bei den folgenden Anwendungen nicht zu wiederholen, da Imidin® sanft Nasen-Pflegespray für die weiteren Anwendungen gebrauchsfertig ist. Sprühdüse in jede Nasenöffnung einführen und 1-2-mal kurz pumpen. Dabei die Flasche möglichst senkrecht halten (Abb. 3).

Kleinkinder und Säuglinge sowie Personen, die Imidin® sanft Nasen-Pflegespray nicht allein anwenden können, sollten auf den Rücken gelegt und der Kopf sollte auf eine Seite gedreht werden, so dass die Flüssigkeit gut ablaufen kann (Abb. 4). Legen Sie eventuell ein Handtuch oder einen anderen Nässeeschutz unter den Kopf. Drücken Sie zunächst den Aufsatz einmal herunter, bis der erste Sprühstoß erfolgt (Abb. 2). Führen Sie nun die Sprühöffnung in das Nasenloch und pumpen Sie 1-mal. Nur so kann die Pumpe nach unten oder horizontal gerichtet optimal funktionieren.



(Abb. 1)

(Abb. 2)

(Abb. 3)

(Abb. 4)

Wie lange sollten Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray anwenden?

Wenden Sie Imidin® sanft Nasen-Pflegespray bis zum Abklingen der Beschwerden an.

8

Hinweise zur Anwendung

Während des Sprühvorgangs leicht einatmen.

Nicht in die Augen sprühen und nicht auf andere Personen richten.

Aus hygienischen Gründen und zur Vermeidung von Infektionen sollte jede Dosiereinheit nur von einer Person benutzt werden. Nach der Anwendung empfiehlt es sich daher auch, den Nasenadapter abzuwaschen und trocken zu halten. Setzen Sie bitte nach der Anwendung die Verschlusskappe wieder auf das Behältnis.

Imidin® sanft Nasen-Pflegespray wird ohne Konservierungsmittel hergestellt und keimfrei abgefüllt. Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch ist daher eine Konservierung nicht erforderlich. Um eine einwandfreie Qualität des Produktes und

die Funktion dieses Applikationssystems über die Anwendungsdauer zu gewährleisten, darf an der Nasensprayflasche keine Manipulation vorgenommen werden.

9 Nebenwirkungen

Bisher keine bekannt.

10 Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinproduktes

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Faltschachtel und dem Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Nach Anbruch nicht länger als 6 Monate verwenden.

11 Wie ist Imidin® sanft Nasen-Pflegespray aufzubewahren?

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

12 Stand der Information

März 2010

Steiner & Co.
Deutsche Arzneimittelgesellschaft mbH & Co. KG
Ostpreußendamm 72/74
12207 Berlin
Tel. 030 710 940
Fax 030 712 5012
info@steinerarznei-berlin.de

Mitvertreiber
Pharma Wernigerode GmbH
Dornbergsweg 35
38855 Wernigerode
Tel. 03943 554 0
Fax 03943 554 183



Erklärung zu den verwendeten Symbolen

	Gebrauchsanweisung beachten!
	Kennzeichnung des Herstellungspostens (Chargenbezeichnung)
	Verwendbar bis
	CE-Kennzeichen

PGI128000/04PHW0310