

# schülke -†



Gebrauchsfertige, mit alkoholischer Wirkstofflösung getränkte Desinfektionstücher.

## mikrocid® AF wipes Jumbo

### Unser Plus:

- gebrauchsfertige, getränkte Desinfektionstücher
- großes Tuch (20 x 27 cm)
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- schnelle Abtrocknung
- 200 Tücher pro Dose / Nachfüllbeutel
- aldehydfrei

### Anwendungsgebiete

Alkoholische Schnelldesinfektion für Medizinprodukte [CE 0297] in allen Bereichen und Flächen aller Art mit erhöhtem Infektionsrisiko und dem Erfordernis kurzer Einwirkzeiten, wie z. B.:

- Patientenbehandlungseinheiten
- Untersuchungsliegen
- OP-Tische mit angrenzenden Arbeitsflächen
- Oberflächen medizinischer Geräte

### Anwendungshinweise

Tücher im schrägen Winkel nach unten abreißen. Flächen mit getränktem Tuch gründlich wischen, auf vollständige Benetzung achten und einwirken lassen. Nach Gebrauch auf guten Verschluss der Deckelklappe achten.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

mikrocid® AF wipes Jumbo wirken gegen:

- Bakterien (inkl. Tb) • Pilze • Viren (Hepatitis-B-Viren, HIV, HCV, Adenoviren, Rotaviren, Papovaviren, Polioviren) • Noroviren

### Einwirkzeiten

| Wirksamkeiten  | Einwirkzeit |
|--|-------------|
| Bakterien, Pilze (gemäß DGHM-Richtlinien bei verkürzten Einwirkzeiten)         | 1 Min.      |
| MRSA<br>Methicillin-resistente Staphylococcus aureus-Stämme                    | 1 Min.      |
| Tb   | 1 Min.      |
| viruzid*   | 30 Min.     |
| begrenzt viruzid* (inkl. HIV, HBV und HCV)                                     | 30 Sek.     |
| Adenoviren (Typ 2)   | 2 Min.      |
| BVDV   | 30 Sek.     |
| Norovirus**  | 1 Min.      |
| Papova SV 40   | 15 Min.     |
| Polioviren   | 30 Min.     |
| Rotaviren  | 30 Sek.     |
| Vacciniavirus  | 30 Sek.     |
| <b>VAH-Liste / Zertifikat</b><br>Flächendesinfektion in Krankenhaus und Praxis | 5 Min.      |
| ÖGHMP-Expertise Nr. 95/8   | 1 Min.      |

\* gemäß RKI-Empfehlung, Bundesgesundheitsblatt 01/2004

\*\* getestet in Anlehnung an EN 14 476; Prüfvirus: Murines Norovirus

# mikrozid® AF wipes *Jumbo*

## Produktdaten

### Zusammensetzung:

Eine Dose bzw. Nachfüllbeutel enthält 200 gebrauchsfertig getränkte Tücher.

100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol

### Chemisch-physikalische Daten der Wirkstofflösung

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Aussehen:       | klare, farblose Flüssigkeit |
| Dichte (20 °C): | 0,90 cm <sup>3</sup>        |
| Flammpunkt:     | 27 °C (DIN 51 755)          |

## Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Xi:</b>  | Reizend                                      |
| <b>R10:</b> | Entzündlich                                  |
| <b>R36:</b> | Reizt die Augen.                             |
| <b>S2:</b>  | Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen. |

## Besondere Hinweise

**Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Nitrilkautschuk) wird empfohlen.

Alkoholempfindliche Flächen (wie z. B. Acrylglas) dürfen nicht behandelt werden.

## Lieferformen / Verpackungseinheiten

| Gebindegrößen                   | Verpackungseinheiten | Art. Nr. |
|---------------------------------|----------------------|----------|
| 200 Jumbo-Tücher-Spenderdose    | 10 Dosen             | 109 157  |
| 200 Jumbo-Tücher-Nachfüllbeutel | 12 Beutel            | 109 159  |

## Zubehör

|                         | Art. Nr. |
|-------------------------|----------|
| Wandhalterung Jumbodose | 134 421  |

## Umweltinformationen

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Informationen

Einen Überblick aller zum Präparat mikrozid® AF wipes *Jumbo* vorliegenden Gutachten / Literatur finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Für Ihre individuellen Fragen:  
Customer Care

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH ist zertifiziert gemäß DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und DIN EN ISO 13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) und verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem gem. Öko-Audit-Verordnung (Reg.-Nr. D-150-00003).

**Schülke & Mayr GmbH**  
22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

**Schülke & Mayr AG**  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44  
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**Schülke & Mayr Ges.m.b.H**  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0  
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)