



AUTO PROTECT



5 mm



8 mm

DE: PZN 11195372 DE: PZN 6426562

Nach ISO 11608-2:2012 getestet, sind die mylife™ Clickfine® AutoProtect™ Sicherheits-Pen-Nadeln bei Anwendung mit den auf der Packung angegebenen Injektionspens voll funktionsfähig und bieten mehr Sicherheit.

Passt auf:

Insulin-Pens

AstraZeneca Ltd.



BYETTA™

Berlin Chemie AG / Haselmeier GmbH



BerliPen® areo 2



BerliPen® PRECISION

Eli Lilly and Company



HumaPen® Luxura HD



HumaPen® SAVVIO™



KwikPen™

Novo Nordisk A/S



NovoPen® 4



NovoPen® 5



FlexPen®



FlexTouch®



Victoza®



NordiPen®

Sanofi



AIISTAR®



ClikSTAR®

Sanofi



Lyxumia® Pen



SoloSTAR®



JuniorSTAR®



Toujeo SoloSTAR®



TactiPen®

Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.



Gansulin Pen

Ypsomed AG



ServoPen®



YpsoPen®

Andere Pens

Genentech, Inc.



Nutropin AQ Pen®

Merck Sharp & Dohme Corp.



Puregon Pen®

Pfizer Ltd.



Genotropin® GoQuick™




Genotropin Pen®


Einige Injektionspens sind nicht in allen Ländern erhältlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller der Injektionspens. Alle Marken sind Handelsmarken der erwähnten Hersteller. Bei der Verwendung der mylife™ Clickfine® AutoProtect™ Sicherheits-Pen-Nadeln beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen Ihres Injektionspens.

mylife™ Clickfine® AutoProtect™


So funktioniert die Sicherheits-Pen-Nadel

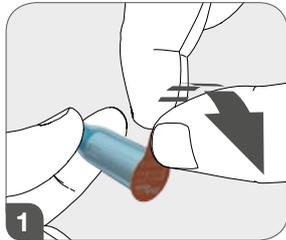


Entfernen Sie die Schutzfolie.

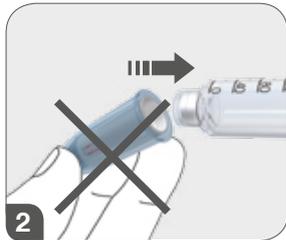

Vermeiden Sie schräges Aufklicken.

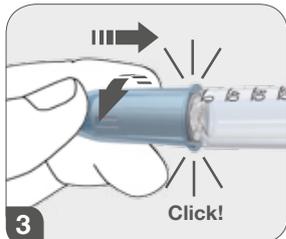

Clicken (oder schrauben) Sie mylife™ Clickfine® AutoProtect™ **unbedingt gerade** auf den Injektionspen. Die Pen-Nadel festdrehen. Der feste Sitz ist beim Aufschrauben auch ohne spürbaren Anschlag gewährleistet.

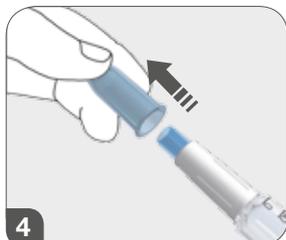


Entfernen Sie die Schutzkappe. Die rote Verriegelungsanzeige ist nicht sichtbar.




Prüfen Sie vor der Injektion die Spritzbereitschaft der Pen-Nadel gemäß der Gebrauchsanweisung Ihres Injektionspens (Durchlässigkeitstest). Stellen Sie die Dosierung gemäß der Anweisungen Ihres Arztes und/oder Pflegepersonals ein.




Üben Sie während der Einstichphase keinen Druck auf den Dosierknopf aus.

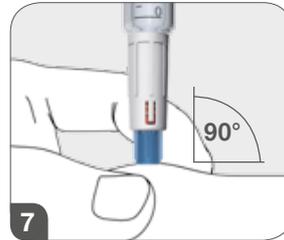


Setzen Sie den Injektionspen unbedingt senkrecht in einem **90°-Winkel** auf die gewünschte Injektionsstelle. Um eine Injektion in den Muskel zu vermeiden, kann es nötig sein, eine Hautfalte zu bilden.

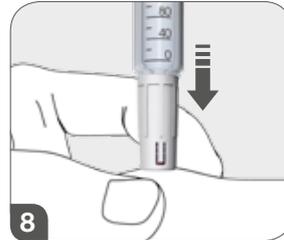


Geben Sie einen leichten Druck auf den Injektionspen, bis die blaue Schutzhülse nicht mehr sichtbar ist.

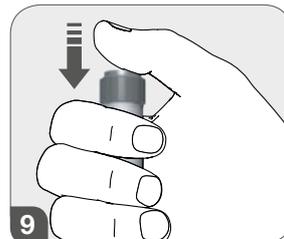

Drücken Sie jetzt den Dosierknopf, injizieren Sie langsam und belassen Sie die Nadel anschließend noch für 10 Sekunden im Fettgewebe, gemäß der Anweisung des behandelnden Arztes und/oder Pflegepersonals.

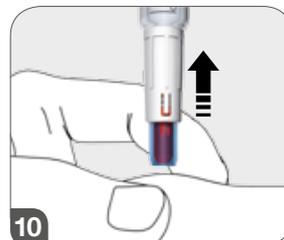

Entfernen Sie den Injektionspen senkrecht von der Injektionsstelle. Die blaue Schutzhülse verriegelt automatisch, und die rote Verriegelungsanzeige wird sichtbar.

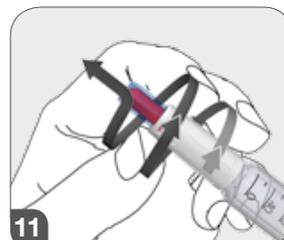

Schrauben Sie die mylife™ Clickfine® AutoProtect™ Pen-Nadel vom Injektionspen ab.



Entsorgen Sie die Nadel sicher gemäß lokaler Vorschriften.