



Liebe Anwenderin, lieber Anwender,

Oxyal® Augentropfen werden angewandt zur Befeuchtung der Augenoberfläche sowie zur Linderung der Symptome des Trockenen Auges. Ein Trockenes Auge kann sich z.B. durch das Gefühl von müden, brennenden, gestressten und/oder geröteten Augen äußern. Oxyal® enthält Hyaluronsäure. Hyaluronsäure kommt im natürlichen Tränenfilm vor und ist für ihre stark feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften bekannt. In Kombination mit dem Polymer PEG 8000 befeuchtet Oxyal® die Augenoberfläche besonders nachhaltig und sorgt für ein besseres Gleiten der Lider auf dem Auge. Die wichtigen Elektrolyte (Kalium, Magnesium, Natrium und Kalzium) und die hypotonische Eigenschaft von Oxyal® tragen zum Abklingen der Beschwerden des Trockenen Auges bei und unterstützen die Wiederherstellung des physiologischen osmotischen Gleichgewichts des Tränenfilms und der Augenoberfläche. Oxyal® enthält ein innovatives Konservierungsmittel, das am Auge in die natürlichen Bestandteile des Tränenfilms Sauerstoff, Wasser und Salzionen zerfällt. Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Produkts. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker oder gern auch an uns. Dr. Winzer Pharma wünscht Ihnen und Ihren Augen alle Gute!

Welche Packungsgrößen sind erhältlich:

Oxyal® ist in Augentropfenflaschen zu 10 ml erhältlich.

Zusammensetzung:

0,15% Hyaluronsäure, 0,5% Polyethylenglycol 8000, Kaliumchlorid, Kalziumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Wasser, Borsäure und Oxyd®. Oxyd® wird als Konservierungsmittel verwendet, das sich auf der Augenoberfläche schnell in Sauerstoff, Wasser und Salz-Ionen umwandelt.

Zweckbestimmung:

Oxyal® wird zur Beruhigung und Linderung der Symptome des Trockenen Auges angewendet. Symptome hierfür können sein: Reizung der Augenoberfläche, Rötung, brennende Augen, Trockenheit, Lichtempfindlichkeit sowie das Gefühl von müden, schmerzenden Augen und dem sog. Sandkorngefühl. Diese Symptome können z. B. durch Bildschirmarbeit, langes Fernsehen, trockene Raumluft oder Klimaanlage hervorgerufen werden.

Wie häufig ist Oxyal® anzuwenden?

Tropfen Sie je nach Bedarf 1 Tropfen Oxyal® in das Auge. Oxyal® ist täglich beliebig häufig nach Bedarf anwendbar. Oxyal® ist zur Benetzung von weichen und harten Kontaktlinsen sowie zur Nachbenetzung während des Tragens anwendbar.

Wichtige Informationen zur Anwendung von Oxyal®:


In seltenen Fällen kann dieses Produkt Überempfindlichkeitsreaktionen, wie z. B. lokale allergische Reaktionen, verursachen. In diesen Fällen sollte das Produkt nicht mehr verwendet werden. Oxyal® enthält das Konservierungsmittelsystem Oxyd®. Bitte verwenden Sie Oxyal® nicht mehr nach dem Mindestverwendbarkeitsdatum. Nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist. Bei Anwendung verschiedener Augenpräparate warten Sie ca. 15 Minuten, bevor Sie ein weiteres Präparat eintropfen. Oxyal® ist für alle Arten von Kontaktlinsen geeignet und kann direkt auf die Kontaktlinsen getropft werden.

So wenden Sie Oxyal® an

Die Abbildungen zeigen Ihnen die einfache Anwendung von Oxyal®.



1. Entfernen Sie vor jeder Anwendung die Schutzkappe der Flasche. Vermeiden Sie den Kontakt der Flaschenspitze mit Ihrem Auge oder Ihren Fingern, um eine mögliche Verunreinigung der Lösung zu verhindern.
2. Legen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten, ziehen Sie Ihr unteres Augenlid mit einem Finger Ihrer freien Hand leicht nach unten und halten Sie die Flasche vertikal mit der Tropfspitze nach unten zeigend über Ihr Auge. Drücken Sie anschließend vorsichtig einen Tropfen aus der Flasche.
3. Setzen Sie die Kappe nach jedem Gebrauch wieder auf die Flasche.

 Hersteller: Dr. Mann Pharma,
Chem.-pharm. Fabrik GmbH
Brunsbütteler Damm 165–173,
13581 Berlin
Vertrieb: Dr. Robert Winzer Pharma
GmbH
Brunsbütteler Damm 165–173,
13581 Berlin
Tel.: (030) 33093-5070
Fax: (030) 33093-305
E-Mail: service@drwinzer.de
www.drwinzer.de



Das Produkt nicht verwenden, wenn die Flasche beschädigt ist.



Das Medizinprodukt kann nach dem ersten Öffnen 2 Monate verwendet werden.



Mindestverwendbarkeitsdatum.



Gebrauchsanleitung beachten!



Chargennummer



Sterilisationsmethode, aseptisch



Das Medizinprodukt ist in einem Temperaturbereich von + 5 °C bis + 25 °C zu lagern

Oxyal® und Oxyd® sind eingetragene
Warenzeichen der Dr. Robert Winzer
Pharma GmbH oder ihrer verbundenen
Unternehmen.

© Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

Weitere Informationen zu Oxyal®

Welche Bedeutung hat die Tränenflüssigkeit?

Die natürliche Tränenflüssigkeit wird mit jedem Lidschlag auf der Augenoberfläche verteilt, um dort das Auge vor dem Austrocknen zu schützen, bei der Heilung von oberflächlichen Verletzungen der Hornhaut zu helfen und Hornhautschäden vorzubeugen. Eine gestörte Tränenproduktion äußert sich durch unterschiedliche Beschwerden, wie z. B. Trockenheitsgefühl, Brennen oder ein Fremdkörpergefühl im Auge, gereizte und gerötete Augen und in manchen Fällen auch tränende Augen.

Wie kann Oxyal® Ihren Augen helfen?

Mit dem 2-Polymer-System aus Hyaluronsäure und PEG 8000 und zusätzlich Wasser mit Kalium, Magnesium, Kalzium und Natrium befeuchtet und ergänzt Oxyal® den Tränenfilm und hilft, dessen Gleichgewicht wiederherzustellen. Ihre Augen sind für eine längere Zeit mit wohlthuender Feuchtigkeit versorgt, werden erfrischt und strahlen einen gesunden Glanz aus. Oxyal® ist ein glasklarer Tropfen, der eine sofortige Sicht ohne Schlieren ermöglicht.

Und das können Sie persönlich tun:

- Legen Sie bei Bildschirmarbeit öfter eine kurze Pause ein.
- Trinken Sie ausreichend (mind. 2 Liter täglich).
- Lüften Sie regelmäßig.
- Schützen Sie Ihre Augen vor Wind, wenn Sie sich im Freien aufhalten.
- Richten Sie Gebläse, bspw. im Auto oder Flugzeug, nicht auf die Augen.