

H.pylori

Selbsttest

Zur Bestimmung von Antikörpern gegen Helicobacter pylori

Kurzanleitung in 6 einfachen Schritten

Vor der Testdurchführung Gebrauchsanweisung bitte genau durchlesen



Schritt 1 • Vorbereitung



- Hände waschen
- Folienbeutel öffnen – Testkassette und Pipette entnehmen

Schritt 2 • Sicherheitslanzette



- blauen Schutzstift drehen und herausziehen
- Fingerbeere massieren, mit Reinigungspad säubern und trocknen lassen
- weiße Öffnung fest gegen die Fingerbeere drücken – Lanzette löst aus

Schritt 3 • Blut aufnehmen



- Pipette in den Blutstropfen halten und bis zur Markierung füllen

Schritt 4 • Testkassette befüllen



- Testkassette auf ebene Fläche legen
- das Vollblut aus der Pipette in die Probenvertiefung der Testkassette geben

Schritt 5 • Testkassette befüllen



- kurz warten, bis das Blut vollständig eingesaugt worden ist
- 4 bis 5 Tropfen des Verdünnungsmittels in die Probenvertiefung der Testkassette geben, Testkassette 2 Minuten nicht bewegen

Schritt 6 • Testergebnis ablesen

