

TRUEyou Kontrollösungen

Verwendungszweck:

TRUEyou Kontrollösung dient zur Funktionskontrolle von TRUEyou Teststreifen bzw. den Blutzucker Mess-Systemen TRUEyou und TRUEyou mini.

Messprinzip:

Verwenden Sie die Kontrolle anstelle von Blut, um zu prüfen, ob Ihr Mess-System korrekt arbeitet. Wenn das vom Mess-System angezeigte Ergebnis im Bereich der auf dem Teststreifen-Röhrchen angegebenen Kontrollwerte liegt, arbeiten System und Teststreifen einwandfrei.

Lagerung und Handhabung:

Die Kontrollösung muss aufrecht und fest verschlossen bei Raumtemperatur aufbewahrt werden. NICHT IM KÜHLSCHRANK ODER GEFRIERSCHRANK AUFBEWAHREN. Temperaturbereich 2-30° Celsius. Notieren Sie sich das Öffnungsdatum der Flasche und verwenden Sie diese dann nicht länger als auf der Verpackung angegeben. Verwenden Sie keine undichten oder beschädigten Kontrollösungen.

Inhalt: 3 ml

Chemische Zusammensetzung:

Wasser, D-Glukose, Puffer, viskositätsverstärkendes Agens, Salze, Farbstoffe und Konservierungsstoffe.

TRUEyou Kontrollösung 1

Artikelnummer: NDI-E5157-80-TRYUU
Kurzbezeichnung: TRUEyou Control 1
PZN: 92 80 946

TRUEyou Kontrollösung 2

Artikelnummer: NDI-E5157-81-TRYUU
Kurzbezeichnung: TRUEyou Control 2
PZN: 92 80 923

TRUEyou Kontrollösung 3

Artikelnummer: NDI-E5157-84-TRYUU
Kurzbezeichnung: TRUEyou Control 3
PZN: 92 80 917