

## Kelo-cote® Gel

KELO-COTE® Gel ist ein leichtes, anwenderfreundliches Silikongel zur Narbenbehandlung. KELO-COTE® reduziert Narben nachweislich und flacht sie ab, mildert Juckreiz und vermindert die Rötung. KELO-COTE® Gel zeichnet sich insbesondere durch seine in zahlreichen Studien nachgewiesene Wirksamkeit und seine patentierte Crosslink-Technologie aus. Diese bewirkt die Bildung eines optimalen, vernetzten Okklusionsfilms, der das Narbengewebe hydratisiert. Die Fibroblasten-Proliferation wird gehemmt und die Kollagensynthese verringert.

KELO-COTE® Gel eignet sich zur Behandlung frischer sowie alter Narben, einschließlich hypertropher Narben und Keloide, nach allgemeinen chirurgischen Eingriffen, bei Verletzungen, Wunden und Verbrennungen.

KELO-COTE® Gel enthält bioinertes und biokompatibles Silikon und eignet sich auch zur Behandlung von Kindern oder Menschen mit empfindlicher Haut.

KELO-COTE® Gel kann zusammen mit Druckverbänden oder anderen Narbentherapien angewendet werden.

Inhaltsstoffe: Siliciumdioxid, Polysiloxan

KELO-COTE® Narben-Gel ist in verschiedenen Tubengrößen erhältlich:

- 6g : für eine Narbengröße von 5-7,5 cm
- 15g : für eine Narbengröße von 7,5-18 cm
- 60g : für eine Narbengröße von 50-70 cm oder 180 cm<sup>2</sup>

## Kelo-cote® UV

KELO-COTE® UV ist das einzige Narbengel mit Sonnenschutz (LSF 30). Das Produkt eignet sich besonders für Hautpartien, die der Sonne ausgesetzt sind.

Bei der Anwendung sollte man darauf achten, KELO-COTE® UV 30 Minuten vor Sonnenexposition aufzutragen und die Anwendung alle 2 bis 3 Stunden zu wiederholen.

Inhaltsstoffe: Siliciumdioxid, Polysiloxan, Isopropylmyristat, Octisalate 5% (Sonnenschutz), Octocrylen 10% (Sonnenschutz), Oxybenzone 6% (Sonnenschutz), Octinosat 7,5% (Sonnenschutz)

KELO-COTE® UV ist in verschiedenen Tubengrößen erhältlich:

- 6g : für eine Narbengröße von 5-7,5 cm
- 15g : für eine Narbengröße von 7,5-18 cm

## Kelo-cote® Spray

KELO-COTE® Spray hat die gleichen guten Eigenschaften wie [KELO-COTE® Gel](#).

Das Spray kann angewandt werden ohne die Wunde zu berühren. Somit eignet es sich insbesondere für berührungsempfindliche oder großflächige Narben (>90cm<sup>2</sup>), wie z. B. nach Verbrennungen. Darüber hinaus kann es auch für die Behandlung von Narben eingesetzt werden, die an schwer erreichbaren Körperstellen liegen.

KELO-COTE® Spray ist in einer 100ml Sprühdose erhältlich.

**Inhaltsstoffe:** Siliciumdioxid, Polysiloxan, Butan, Pentan