

# Askina® Carbosorb

## Adsorbierender Wundverband



### TIPPS ZUR FIXIERUNG

- › Fixierung mit einer zirkulären Fixier- oder Kompressionsbinde am Unterschenkel bzw. Fuß.
- › Eine randseitige Fixierung ist mit Rollenplastern entsprechender Breite möglich. Auf hautschonende Klebeeigenschaften ist zu achten.
- › Fixierung mit einem flächigen Fixiervlies an Stellen, auf die Bewegung und Scherkräfte einwirken.

Die sterile, nichthaftende Wundkomresse Askina® Carbosorb ist im Inneren mit einem Aktivkohlefilter versehen, der sowohl Gerüche als auch Bakterien adsorbiert. Der Wundverband ist geeignet für die Behandlung von wenig bis stark exsudierenden oberflächlichen bis tiefen Wunden, besonders wenn eine Infektion und/oder die Entwicklung unangenehmer Gerüche vorliegt.

Die der Wundseite zugewandte weiche, sehr feste Schicht aus Viskose-, Polyamid- und Polyestergerewebe besitzt eine hohe Saugfähigkeit.

### Einsatzgebiete

- › Ulcus cruris venosum
- › Fäkale Fisteln
- › Infizierte und/oder unangenehm riechende chirurgische oder traumatische Wunden
- › Als Sekundärverband, besonders bei sehr unangenehm riechenden Wunden, wenn kein Folienverband verwendet werden kann

Askina® Carbosorb	Abmessung	VE	PZN	REF
	10 cm x 10 cm	10 Stück	7267077	9025006
	10 cm x 20 cm	10 Stück	7267083	9025014

