


zur Verfügung gestellt von Gebrauchs.info

Mepilex[®] Border Lite

WITH SAFETAC[®] TECHNOLOGY

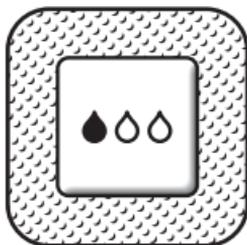

Single use
Usage unique

STERILE EO

CE 0086

EP 633 757
US 5,635,201

USA 1-800-882-4582
Canada 1-800-494-5134




MÖLNLYCKE
HEALTH CARE

Manufacturer

Mölnlycke Health Care AB

Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

aktualisierung/stand Gebrauchs.info November 2011

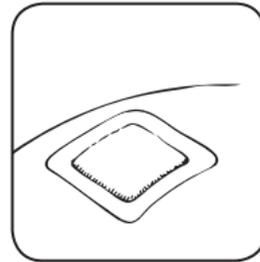

Mepilex® Border Lite

Weicher, selbsthaftender, silikonbeschichteter Schaumverband

Produktbeschreibung

Mepilex Border Lite besteht aus:

1. einer Safetac Wundkontaktschicht
2. einem aus zwei Schichten bestehenden Absorptionspad: einem Polyurethanschaum und einer weiterleitenden Vliesschicht
3. einem wasserdampfdurchlässigen und wasserfesten äußeren Film

Safetac Technologie

Safetac ist eine patentierte Silikon-Hafttechnologie. Verbände mit Safetac Technologie minimieren die Traumatisierung der Wunde und reduzieren Schmerzen für den Patienten. Verbände mit Safetac-Technologie sind weniger schmerzhaft, weil

1. sie sanft auf trockenen Oberflächen, wie z. B. der Haut, aber nicht auf feuchten Oberflächen, wie z. B. offenen Wunden, haften.
2. sie sich auch den kleinsten Unebenheiten der Haut anpassen und so eine größere Kontaktfläche zur Haut schaffen. Hierdurch werden die Abziehkräfte des Verbandes auf eine größere Fläche verteilt und keine Epidermiszellen abgezogen.
3. sie die Wundränder versiegeln und die Mazeration minimieren, da sich das Exsudat nicht auf der umgebenden Haut verteilen kann.

Eigenschaften

Mepilex Border Lite ist ein dünner, flexibler, selbstklebender Verband, der Exsudat absorbiert, ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhält und das Mazerationsrisiko minimiert.

Da Mepilex Border Lite die feuchte Wundumgebung aufrecht erhält, kann bei einem unterstützenden Débridement die Wunde zunächst größer werden. Das ist normal und muss erwartet werden.

Mepilex Border Lite kann auch unter Kompression verwendet werden.

Außerdem eignet sich Mepilex Border Lite auch für den Gebrauch in Kombination mit Gelen.

Anwendungsgebiete

Mepilex Border Lite ist für die Behandlung einer Vielzahl von nicht oder leicht exsudierenden Wunden geeignet, darunter Bein- und Fußgeschwüre

zur Verfügung gestellt von **Gebrauch.info**



Druckgeschwüre sowie traumatische Wunden wie Schürfwunden, Fingerverletzungen, Blasen und Hautrisse.

Mepilex order Lite kann außerdem als Schutz für gefährdete und/oder fragile Haut benutzt werden.

Anwendungshinweise

1. Reinigen Sie die Wunde in der üblichen Weise.
2. Trocknen Sie die wundumgebende Haut gründlich.
3. Entfernen Sie den Schutzfilm und bringen Sie den Verband mit der haftenden Seite auf die Wunde auf. Den Verband nicht überdehnen.
4. Um bestmögliche Resultate zu erzielen, sollte Mepilex Border Lite die trockene, wundumgebende Haut bei kleineren Wunden um mindestens 1-2 cm und bei größeren Wunden um 5 cm überlappen, um die wundumgebende Haut vor Mazeration zu schützen und den Verband sicher zu fixieren.

Verbandwechselintervalle

Mepilex Border Lite kann je nach Zustand der Wunde und der wundumgebenden Haut sowie gemäß der gängigen klinischen Praxis mehrere Tage lang auf der Wunde verbleiben.

Ein Wechsel auf einen anderen Verbandtyp kann ein anfängliches Zunehmen der Exsudatmenge zur Folge haben, so dass häufigere Verbandwechsel erforderlich werden.

Hinweise

Die Wunde sollte stets auf Anzeichen von Infektion überwacht werden. Medizinisches Fachpersonal ist hinzuzuziehen. Mepilex Border Lite sollte nicht in Kombination mit Oxidationsmitteln wie Hypochloritlösungen oder Wasserstoffperoxid verwendet werden.

Die Leistungsfähigkeit des Produkts kann bei wiederholter Anwendung eingeschränkt sein und es können Kreuzkontaminationen auftreten.

Mepilex Border Lite sollte trocken und unter 35°C gelagert werden.

Steril. Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt bzw. geöffnet ist. Nicht resterilisieren.



Mepilex und Safetac sind eingetragene Warenzeichen der Mölnlycke Health Care AB.

