
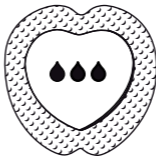


zur Verfügung gestellt von [Gebrauchs.info](http://Gebrauchs.info)

 **Mepilex® Border**

 **Mepilex® Border Sacrum**

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

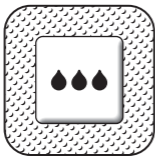

Single use  
Usage unique

**STERILE EO**

**CE** 0086

**EP 633 757**  
**US 5,635,201**

USA 1-800-882-4582  
Canada 1-800-494-5134



**MÖLNLYCKE**  
**HEALTH CARE**



Manufacturer

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden

aktualisierung/stand [Gebrauchs.info](http://Gebrauchs.info) November 2011

**Mepilex® Border** zur Verfügung gestellt von **Gebrauchs.info**



**Mepilex® Border Sacrum**



**Aktualisierungsstand Gebrauchs.info November 2011**

# Mepilex® Border mit Safetac® Technologie

Dünnere, silikonbeschichteter Schaumverband

## Produktbeschreibung

Mepilex Border besteht aus:

- 1.einer Safetac Wundkontaktschicht
- 2.einem flexiblen, aus drei Schichten bestehenden Absorptionspad: Polyurethanschaum, eine weiterleitende Vliesschicht und eine Schicht aus hochabsorbierenden Polyacrylatfasern
- 3.einem wasserdampfdurchlässigen und wasserfesten äußeren Film

## Safetac Technologie

Safetac ist eine patentierte Silikon-Hafttechnologie. Verbände mit Safetac Technologie minimieren die Traumatisierung der Wunde und reduzieren Schmerzen für den Patienten. Verbände mit Safetac-Technologie sind weniger schmerzhaft, weil

- 1.sie sanft auf trockenen Oberflächen, wie z. B. der Haut, aber nicht auf feuchten Oberflächen, wie z. B. offenen Wunden, haften.
- 2.sie sich auch den kleinsten Unebenheiten der Haut anpassen und so eine größere Kontaktfläche zur Haut schaffen. Hierdurch werden die Abziehkräfte des Verbandes auf eine größere Fläche verteilt und keine Epidermiszellen abgezogen.
- 3.sie die Wundränder versiegeln und die Mazeration minimieren, da sich das Exsudat nicht auf der umgebenden Haut verteilen kann.

## Eigenschaften

Mepilex Border ist ein flexibler, selbstklebender Verband, der Exsudat absorbiert, ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhält und das Mazerationsrisiko minimiert.

Da Mepilex Border die feuchte Wundumgebung aufrecht erhält, kann bei einem unterstützenden Débridement die Wunde zunächst größer werden. Das ist normal und muss erwartet werden.

Mepilex Border kann auch unter Kompression verwendet werden.

Außerdem eignet sich Mepilex Border auch für den Gebrauch in Kombination mit Gelen.

zur Verfügung gestellt von **Gebrauch.info**



## Anwendungsgebiete

Mepilex Border ist für die Behandlung einer Vielzahl von exsudierenden Wunden geeignet, darunter Bein-, Fuß- oder Druckgeschwüre und traumatische Wunden wie Hautrisse oder chirurgische Wunden.

Außerdem eignet sich Mepilex Border bei trockenen/nekrotischen Wunden auch für den Gebrauch in Kombination mit Gelen.

## Anwendungshinweise

1. Reinigen Sie die Wunde in der üblichen Weise.
2. Trocknen Sie die wundumgebende Haut gründlich.
3. Entfernen Sie den Schutzfilm und bringen Sie den Verband mit der haftenden Seite auf die Wunde auf. Den Verband nicht überdehnen.
4. Um bestmögliche Resultate zu erzielen, sollte Mepilex Border die trockene, wundumgebende Haut bei kleineren Wunden um mindestens 1-2 cm und bei größeren Wunden um 5 cm überlappen, um die wundumgebende Haut vor Mazeration zu schützen und den Verband sicher zu fixieren.

## Verbandwechselintervalle

Mepilex Border kann je nach Zustand der Wunde und der wundumgebenden Haut sowie gemäß der gängigen klinischen Praxis mehrere Tage lang auf der Wunde verbleiben.

Ein Wechsel auf einen anderen Verbandtyp kann ein anfängliches Zunehmen der Exsudatmenge zur Folge haben, so dass häufigere Verbandwechsel erforderlich werden.

## Hinweise

Die Wunde sollte stets auf Anzeichen von Infektion überwacht werden. Medizinisches Fachpersonal ist hinzuzuziehen. Verwenden Sie Mepilex Border nicht zusammen mit oxidierenden Substanzen, wie z. B. Hypochlorit- Lösungen oder Wasserstoffperoxid.

Die Leistungsfähigkeit des Produkts kann bei wiederholter Anwendung eingeschränkt sein und es können Kreuzkontaminationen auftreten.

Mepilex Border sollte trocken und unter 35 °C gelagert werden.

Steril. Nicht verwenden, wenn die Sterilverpackung beschädigt bzw. geöffnet ist. Nicht resterilisieren.

Mepilex und Safetac sind eingetragene Warenzeichen der Mölnlycke Health Care AB.





Revised 2010-04

**40337-04**