

# PermaFoam®

## Der hydrophile Schaumstoffverband mit besonderer Porenstruktur

### Charakteristik

Schaumstoffverband mit wasserdampfdurchlässiger Polyurethan-Deckschicht; die hydrophile, grobporige Schaumstoffstruktur sorgt durch eine verstärkte Kapillarwirkung für einen schnellen Transport von Wundexsudat und gewährleistet ein ausgeglichenes feuchtes Wundmilieu, Keime und Zelltrümmer werden sicher eingeschlossen und bleiben auch unter Kompression gebunden; weich und geschmeidig, mit guter Polsterwirkung, ohne Wundirritation zu entfernen; in verschiedenen Ausführungen und Zuschnitten erhältlich.

### Anwendung

Zur Behandlung klinisch nicht infizierter, stark bis mäßig sezernierender Wunden in der Reinigungs- und Granulationsphase; insbesondere bei chronischen Problemwunden wie z. B. Ulcus cruris oder Dekubitus; besonders geeignet zur Behandlung venöser Ulzera in Kombination mit einer Kompressionsbehandlung; zur Versorgung von Verbrennungen bis Grad 2a; für tiefere Wunden oder schwierig zu versorgende Problemzonen werden die jeweils spezifischen Zuschnitte eingesetzt.



### PermaFoam®

In verschiedenen Größen für einen bedarfsgerechten Einsatz.

### PermaFoam® comfort

Zur sicheren, keimdichten Fixierung ist PermaFoam mit einer umlaufenden, hypoallergenen Klebefolie ausgestattet. IM = Innenmaß

### PermaFoam® sacral

Der spezifische Zuschnitt eignet sich zur Behandlung im Sakralbereich; mit umlaufender, hypoallergener Klebefolie für sicheren Halt. IM = Innenmaß

### PermaFoam® concave

Zur Behandlung an Ferse, Knie- und Ellenbogen; der spezielle Zuschnitt mit umlaufender, hypoallergener Klebefolie lässt sich problemlos anlegen und haftet sicher. IM = Innenmaß

### PermaFoam® cavity

Zur Behandlung von tiefen Wunden; das dünne, weiche Material mit spezieller Lochstruktur erlaubt vielfältige Faltungsmöglichkeiten zur individuellen Anpassung an die Wunde und gewährleistet einen guten Sekretabfluss.

### PermaFoam® tracheostomy

Zur Versorgung von Eintrittsstellen wie Tracheostomiekanülen und Sondenapplikationen; mit Y-Schnitt.



Durch die besonders grobporige Schaumstoffstruktur nimmt PermaFoam selbst feste, unlösliche Bestandteile sowie Beläge und dickflüssiges Sekret aus der Wunde auf und sorgt so für eine schnelle, effektive Reinigung.

	Packungs- inhalt	Artikel- Nummer	PZN	Vers.-Einh. Packungen
<b>PermaFoam® steril, einzeln eingeschleget</b>				
Ø 6 cm	10 Stück	409 427	3446216	6
10x10 cm	10 Stück	409 401	4094328	6
10x20 cm	5 Stück	409 403	4094357	6
15x15 cm	5 Stück	409 405	4094334	6
20x20 cm	3 Stück	409 406	4094363	6
<b>PermaFoam® comfort steril, einzeln eingeschleget</b>				
8x8 cm (IM 3,5x3,5 cm)	10 Stück	409 428	3446222	6
11x11 cm (IM 6x6 cm)	10 Stück	409 408	4094392	6
10x20 cm (IM 5x14 cm)	5 Stück	409 410	4094423	6
15x15 cm (IM 10x10 cm)	5 Stück	409 412	4094400	6
20x20 cm (IM 14x14 cm)	3 Stück	409 413	4094446	6
<b>PermaFoam® sacral steril, einzeln eingeschleget</b>				
18x18 cm (IM 11x9,5 cm)	3 Stück	409 422	3446038	6
22x22 cm (IM 14,5x12,5 cm)	3 Stück	409 423	3446044	6
<b>PermaFoam® concave steril, einzeln eingeschleget</b>				
16,5x18 cm (IM 10,5x12 cm)	3 Stück	409 424	3446050	6
<b>PermaFoam® cavity steril, einzeln eingeschleget</b>				
10x10 cm	3 Stück	409 425	3446067	12
<b>PermaFoam® tracheostomy steril, einzeln eingeschleget</b>				
8x8 cm	10 Stück	409 426	3446104	6