

Systeme*

BENETZUNGSTROPFEN
FÜR DIE AUGEN

HYDRATION

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsinformation sorgfältig durch, und bewahren Sie sie auf, um sie später noch einmal nachlesen zu können.

BESCHREIBUNG:

Bei **SYSTANE* HYDRATION Benetzungstropfen für die Augen** handelt es sich um eine sterile Lösung mit folgenden Inhaltsstoffen: Natriumhyaluronat, Polyethylenglykol 400, Propylenglykol, Hydroxypropyl-Guar, Sorbitol, Aminomethylpropanol, Borsäure, Natriumborat, Dinatriumedetat, Natriumcitrat, Kaliumchlorid, Natriumchlorid und das Konservierungsmittel POLYQUAD® (Polyquaternium-1) 0,001%.

ANWENDUNGSGEBIETE

SYSTANE* HYDRATION Benetzungstropfen für die Augen dienen der Therapie Trockener Augen. Sie lindern vorübergehend die Symptome Trockener Augen wie Brennen und Irritationen.

SYSTANE* HYDRATION Benetzungstropfen für die Augen können zur Befeuchtung und Nachbenetzung von Tageslinsen, Linsen zum verlängertem Tragen und Austauschlinsen verwendet werden, sowohl bei Silikon-Hydrogel-Kontaktlinsen als auch weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen.

GEGENANZEIGEN (Gründe gegen eine Anwendung):


Wenn Sie allergisch gegen einen der Inhaltsstoffe von **SYSTANE* HYDRATION Benetzungstropfen für die Augen** sind, sollten Sie dieses Produkt nicht verwenden.





WARNHINWEISE:

Es ist wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Arztes oder Apothekers und die Packungshinweise zur korrekten Anwendung des Produktes beachten. Wenn es zu anhaltenden Augenbeschwerden, übermäßigem Tränenfluss, Sehveränderungen oder Augenrötung kommt, benutzen Sie **SYSTANE* HYDRATION Benetzungstropfen für die Augen** nicht mehr und suchen Sie Ihren Arzt oder Apotheker auf, da sich die Beschwerden verschlimmern könnten.

SYSTANE* HYDRATION Benetzungstropfen für die Augen ist kein Reinigungs- oder Desinfektionsmittel für Kontaktlinsen. Weichen Sie Ihre Linsen nicht in **SYSTANE* HYDRATION Benetzungstropfen für die Augen** ein und desinfizieren Sie nicht damit.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie jede Berührung der Tropferspitze mit anderen Oberflächen, um Verunreinigungen zu verhindern.
- Nach Gebrauch wieder verschließen.
- Flasche bei Nichtgebrauch stets fest verschlossen halten.
- Vor dem auf Packung und Flasche angegebenen Verfalldatum verwenden. 

- Nicht verwenden bei fehlendem oder beschädigtem Anbruchschutz. Nicht verwenden, wenn die Packung geöffnet oder beschädigt wurde. 
- Nach Anbruch 3 Monate lang haltbar.  Verwerfen Sie Restmengen der Tropfen drei Monate nach Anbruch der Flasche.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
- Nicht über 30°C lagern. 

ANWENDUNGSHINWEISE:

- Flasche vor Gebrauch gut schütteln.
- Geben Sie nach Bedarf ein bis zwei Tropfen in das/die Auge(n) und blinzeln Sie.
- Wenn während des Kontaktlinsentragens leichtere Reizung, Missempfinden oder verschwommenes Sehen auftreten, geben Sie ein bis zwei Tropfen auf die Linsen und blinzeln Sie zwei bis dreimal.
- **SYSTANE* HYDRATION Benetzungstropfen für die Augen** können täglich nach Bedarf angewendet werden, um Symptome des Trockenen Auges zu lindern.

PACKUNGSGRÖSSEN:

SYSTANE* HYDRATION Benetzungstropfen für die Augen sind in Packungsgrößen von 10 ml und 3 x 10 ml erhältlich.

STERILE | A

VERTRIEB für Deutschland

Alcon Pharma GmbH
Blankreutestraße 1
79108 Freiburg

VERTRIEB für Österreich

Alcon Ophthalmika GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 17
1020 Wien



Alcon Laboratories, Inc.
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, 76134 USA

EC | REP

Alcon Laboratories (U.K.) Ltd.
Frimley Business Park
Frimley, Camberley
Surrey, GU16 7SR
Vereinigtes Königreich



© 2015 Novartis

*ein Warenzeichen von Novartis

Alcon[®]
a Novartis company

667570