



VapoSpray

mit Meerwasser

Hypertonisches Spray
zur Nasenspülung

Lesen Sie vor der Anwendung bitte die Gebrauchsanweisung.

 2012-10

Gebrauchsanweisung:

- Drücken Sie vor der ersten Anwendung kurz auf den Sprühkopf, um den Applikator zu aktivieren
- Neigen Sie den Kopf zur Seite und halten Sie das Ende des Sprühkopfs in das Nasenloch
- Drücken Sie kurz (1 – 2 Sekunden) auf den Sprühkopf
- Fangen Sie die herauslaufende Lösung auf und putzen Sie anschließend Ihre Nase
- Wiederholen Sie den Vorgang im anderen Nasenloch
- Reinigen Sie den Sprühkopf nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser

Mehrmals täglich in jedem Nasenloch anwenden.

Für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren.

Bei einem bestimmungsgemäßen Gebrauch von WICK VapoSpray sind keine Gegenanzeigen bekannt.

Wenn Sie gleichzeitig Arzneimittel in der Nase anwenden müssen, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung:

WICK VapoSpray mit Meerwasser ist ein Spray zur Nasenspülung, das aus einer hypertonischen

Meerwasser-Lösung besteht:

Gefiltertes Meerwasser 80 Gew.-%

Gereinigtes Wasser 20 Gew.-%